

Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.

NL

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPES SILICONE VOOR HET CONTROLEREN VAN DE PASVORM EN HET OCCLUSALE CONTACT

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

- Voor het controleren van de pasvorm van
 - *Kronen : randen, proximale en occlusale vlakken.
 - *Gegoten kappen : pasvorm kap.
 - *Inlays : randen, proximale vlakken.
 - *Prothesen : mucosale vlakken.
- Om de occlusale registratie te controleren.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het extruderen van FIT CHECKER ADVANCED BLUE moet vermenging en/of contact met de volgende materialen nauwlettend worden vermeden. Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen: katalysator voor afdruckmaterialen van condensatiesilicone, afdruckmaterialen van polysulfide, eugenol bevattende materialen, zwavel, latex, olie, acrylaten, glycerol, oppervlakteverdoevingsmiddelen in spuitbus- of zalfvorm (bijv. lidocaïne).

GEBRUIKSAANWIJZING

CARTRIDGES LADEN EN DOSEREN

- Druk de ontgrendelhendel van de GC CARTRIDGE DISPENSER II op en trek de plunjer volledig terug. Klap de borgklep van de cartridgehouder omhoog en laad de cartridge en zorg ervoor dat de V-vormige inkeping in de flens van de cartridge omlaag is gericht. Sluit de borgklep om de cartridge te zekeren.
- Duw de ontgrendelhendel omhoog en schuif de plunjer naar voren tot in de cartridge.
- Verwijder het dopje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hendel van de dispenser zachtjes in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge te spuiten. Controleer of basismateriaal en katalysator er gelijkmatig uitkomen.
- Richt de V-vormige inkeping in de borgring van de MENGNAALD II op de V-vormige markering tussen de twee cartridgecilinders. De mengnaald stevig aandrukken en de gekleurde borgring van de mengnaald, een kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.
- Een aantal keren de hendel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIET verwijderen daar deze tevens als afsluiting dient totdat de cartridge opnieuw wordt gebruikt. De mengnaald wordt verwijderd door de borgring van de mengnaald tegen de klok in te draaien tot de V-vormige markering gelijk ligt met die op de cartridge. De mengnaald iets naar beneden kantelen en eraf trekken.

- Verwijder de oude mengnaald en plaats pas een nieuwe direct voor hergebruik. Voordat een nieuwe mengnaald wordt bevestigd spuit men een beetje basis- en katalysatormateriaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beiden gelijk uitstromen. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening vrij van eventueel uitgehard materiaal.
- Om de cartridge te vervangen duwt men de ontgrendelhendel omhoog en trekt men de plunjer volledig naar achteren. Klap de borgklep omhoog, verwijder de cartridge en plaats een nieuwe in de dispenser.

PASVORM CONTROLE

- Breng het mengsel aan in het prothetische hulpmiddel en plaats dit vervolgens in de mond. De verwerkingstijd is 1 minuut vanaf het moment van mengen bij 23°C (73,4°F.) Houd in positie gedurende 1 minuut totdat het materiaal is uitgehard.
- Verwijder de voorziening met een daarvoor geschikt instrument. Controleer de dikte van FIT CHECKER ADVANCED BLUE om de pasvorm vast te stellen. De pasvorm is voldoende als er een uniforme dunne film zichtbaar is. Als er een plek is waar de film extreem dun is, dan moet deze worden gecorrigeerd volgens standaard technieken.
- Na beoordeling het materiaal verwijderen en de prothetische voorziening reinigen.
Opmerking:
 - Gebruik geen FIT CHECKER ADVANCED BLUE op oppervlakken die bedekt zijn met een silicone relining materiaal daar het daarna lastig te verwijderen is.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE is zeer vloeibaar. Voorkom dat het materiaal in de keel van de patiënt loopt.
 - Voorkom uitdroging van de tanden en het omliggende tandvlees als FIT CHECKER ADVANCED BLUE wordt aangebracht.
 - Door de unieke chemische samenstelling van FIT CHECKER ADVANCED BLUE polymeriseert het materiaal sneller dan bij kamertemperatuur. Daarom moet in de mond worden getest of het materiaal is uitgehard. Testen op kamertemperatuur buiten de mond geeft verkeerde informatie.
 - Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

BEETREGISTRATIE

- Breng het mengsel aan op het occlusale vlak laat de patiënt langzaam occluderen. Houd daarna gedurende 1 minuut in rust tot het materiaal is uitgehard.
- Na uitharding, de afdruck uit de mond nemen en beoordeel de occlusale contacten.
- Spoel de afdruck onder stromend water en desinfecteer met een geschikt desinfectans.
Opmerking:
 - Blok de ondersnijdingen uit met was wanneer een beetregistratie wordt gedaan bij patiënten met orthodontische voorzieningen.
 - Wanneer een beetregistratie wordt genomen van een model, breng dan een dunne laag vaseline aan op het model of de voorziening alvorens FIT CHECKER ADVANCED BLUE aan te brengen.

KLEUR

BLAUW

OPSLAG

Opslag op kamertemperatuur weg van direct zonlicht (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de datum van fabricage).

VERPAKKINGEN

Verpakking met twee cartridges : Cartridge 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

WAARSCHUWING

- In geval van contact met slijmvlies of huid, verwijder het materiaal en was met water.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.
- Meng FIT CHECKER ADVANCED BLUE niet met componenten van andere producten.
- Voorkom dat het materiaal op kleding komt daar het zich lastig laat verwijderen.
- In geval van contact met de huid, het materiaal verwijderen nadat het is uitgehard. Indien het wordt verwijderd alvorens het is uitgehard, kleurt het de huid.
- Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.
- Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondkapjes en veiligheidsbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com>
of voor Amerika
<http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd. NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 06/2016