

GC TISSUE CONDITIONER

TISSUE CONDITIONER EN RELINING MATERIAAL

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

1. Tissue conditioning.
2. Tijdelijke relining.
3. Maken van functionele afdrukken.

CONTRA-INDICATIES

Vermijd gebruik van dit product bij patiënten met bekende allergie voor methacrylaatmonomeer, methacrylaatpolymeer, ethanol of alifatisch zuurester gebaseerde weekmaker.

GEbruIKSAANWIJZING

1. VOORBEREIDING

Controleer de gebitstoestand van de patiënt en de prothese welke wordt gedragen. Pas de prothese daar waar nodig aan met een hardmetalen boor, reinig en droog. Creëer voldoende ruimte zodat GC TISSUE CONDITIONER kan worden aangebracht in een minimale dikte van 1 mm. Hiermee behoudt men de elasticiteit van de conditioner. Breng COCOA BUTTER of vaseline aan op de delen waar de prothese niet gerelined mag worden.

2. DOSERING POEDER EN VLOEISTOF

De standaard poeder-vloeistofverhouding is 2,4 g / 2 mL (een eenheid poeder op 2 eenheden vloeistof). Doe de benodigde hoeveelheden poeder en vloeistof in de rubberen mengcup.

Opmerking:

a) Als u minder vloeistof gebruikt, is de gelfase korter en het mengsel viskeuzer. Meer vloeistof resulteert in een langere gelfase en een minder viskeus mengsel.

b) Het poeder kan klonters vormen in de fles onder bepaalde bewaaromstandigheden. Dit heeft geen invloed op de werking.

c) Sluit de flessen met poeder, vloeistof en coating onmiddellijk na gebruik zorgvuldig.

3. MENGEN

Meng poeder en vloeistof gedurende 30-60 seconden tot dat het mengsel een romige consistentie bereikt.

4. TOEPASSING

1) De coating kan worden gebruikt als middel om de hechting te verbeteren en om eventueel loskomen te voorkomen.

Penseel de coating enkel op die delen waar een sterkere hechting nodig is. In dit geval kan GC TISSUE CONDITIONER er later niet met de hand worden afgetrokken.

2) Breng het mengsel gelijkmatig aan op het voorbehandelde oppervlak van de prothese.

Opmerking:

a) Maak uw vingertoppen en instrumenten nat met water om te voorkomen dat het materiaal vastplakt. Gebruik geen lotion of vaseline.

b) Voorkom dat een overmaat aan materiaal in de keel loopt.

3) Plaats de prothese in de mond. Vraag de patiënt om zachtjes in centrale positie te sluiten en de lippen en kaken te bewegen voor muscle trimming. Na 5 minuten neemt u de prothese uit de mond en inspecteert u deze op overtollig materiaal en onvolkomenheden.

4) Verwijder overtollig materiaal met een scherp instrument.

5. AFWERKEN:

1) Spoel het speeksel van de gerelinede prothese onder stromend water af. Blaas met een luchtsput droog.

2) Breng de coating aan op de gerelinede oppervlakken van de prothese. Blaas de coating grondig droog met een luchtsput of laat de prothese 4-5 minuten onberoerd.

Opmerking:

Om de randafdichting te verbeteren kan de coating ook worden aangebracht op het raakvlak van GC TISSUE CONDITIONER en prothese.

3) Plaats de prothese opnieuw in de mond.

Opmerking:

a) Als u de prothese voor plaatsing in de mond onderdompelt in water vermindert dit ongewenste geuren.

b) Vraag de patiënt om de gerelinede gedeelten met de vingers onder stromend water te reinigen. Het gebruik van een borstel kan de gerelinede delen beschadigen. Er dient op gelet te worden dat er gedurende langere tijd geen prothesereinigingsmiddelen mogen worden gebruikt.

6. VERWIJDERING

Aanbevolen wordt het materiaal na een paar dagen of weken te verwijderen of te ververset, afhankelijk van iedere klinische situatie.

GC TISSUE CONDITIONER kan handmatig uit de prothese worden verwijderd.

Gebruik een scherp instrument of een boor om het gedeelte te verwijderen waar de coating is gebruikt als hechtmiddel.

OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25 °C) (39,2-77,0 °F) buiten het bereik van direct zonlicht en hoge temperaturen.

KLEUREN

Live pink, White

VERPAKKINGEN

1. 1-1 verpakking

Kit bevat: poeder 90 g (1), vloeistof 90 g (101 mL) (1), coating 12 g (15 mL) (1), poedermaatbeker (1), plastic vloeistofpipet nr.1 (1), penseel nr.7 (1), plastic spatel (1), rubberen mengcup (groot) (1)

2. Apart leverbaar

a. GC TISSUE CONDITIONER poeder 90 g (in elke kleur)

b. GC TISSUE CONDITIONER vloeistof 90 g (101 mL)

c. GC TISSUE CONDITIONER coating 12 g (15 mL)

WAARSCHUWING

1. De vloeistof is ontvlambaar. Vermijd ontstekingsbronnen. Bewaar of gebruik de vloeistof niet in de buurt van vuur of hoge temperaturen.

2. Gebruik de vloeistof in een goed geventileerde ruimte. Sluit de fles onmiddellijk na gebruik.

3. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.

4. Vermijd direct huidcontact met de vloeistof, het mengsel of de coating. In geval van contact met de huid, het gemorst materiaal onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpropje gedrenkt in alcohol, daarna spoelen met water.

5. De coating kan na een tijdje verkleuren en geel worden. Dit heeft geen nadelig effect op de werking.

6. Niet mengen met andere producten.

7. Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

8. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gc-europe.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden.

Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale / nationale richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren:

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en en evenals ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc-dental.

Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 08/2019