

SOFT-LINER

WEEKBLIJVEND MATERIAAL VOOR EEN TIJDELIJKE REBASING

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen
door tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

Voor tijdelijk rebasen (relinen) van prothesen op
acrylaatbasis. Voor conditioneren van de slijmhuide.

CONTRA-INDICATIES

Patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn
voor acrylaten. Verwijs de patiënt naar een arts als
allergische reacties optreden.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. VOORBEREIDEN

- a) Maak het contactoppervlak goed schoon met
puimsteen en water en ruw het oppervlak op dat
gerelined moet worden.

2. MENGEN

- a) De standaard poeder-vloeistofverhouding is
2,2g / 1,8g, (eerste deelstreep op het
poedermaatje met 4 deelstrepen op de pipet
aan vloeistof).
Opmerking :
De consistentie kan gewijzigd worden door de
poeder-vloeistofverhouding te variëren.
- b) Deponeer in het mengglas en meng gedurende
30 - 60 seconden.

3. RELINEN

- a) Verdeel het mengsel zo gelijkmatig mogelijk
over de prothese.
- b) Plaats de prothese in de mond, ga over tot
muscle trimming en houd de prothese in de
centrale positie gedurende 4 - 5 minuten.
- c) Neem de prothese uit en inspecteer deze op
onvolkomenheden.
- d) Dompel de prothese in koud water en neem de
overmaat aan de randen weg met een
verwarmd scherp instrument.

OPSLAG

Bewaar op een koele donkere plaats buiten het
bereik van direct zonlicht. (4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F)
(Houdbaarheid: Tot 3 jaar na de productiedatum)

VERPAKKINGEN

1-1 verpakking : 100g poeder, 100g (97mL) vloeistof
en accessoires.

OPMERKING

Sluit de flessen direct na gebruik.

WAARSCHUWING

1. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met
water spoelen en medisch advies inwinnen.
2. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen
zoals handschoenen, mondmaskers en
beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het
huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden
geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u
vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen
beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw
leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om
kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient
dit instrument en het label gedesinfecteerd te
worden. Inspecteer het instrument en het label direct
na gebruik op beschadigingen. Gebruik het
instrument niet meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument
grondig om het opdrogen en accumuleren van
verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met
een medisch geregistreerd infectie controle product
welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 09/2016