

Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.

NL

AROMA FINE PLUS

ALGINAAT AFDRUKMATERIAAL

Alleen te gebruiken door tandheelkundig
gekwalficeerden in de vermelde toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

Eerste afdrukken.

Afdrukken voor het vervaardigen van:

- werkmodellen voor tijdelijke inlays, onlays, kronen en bruggen
- orthodontische werkmodellen
- studiemodellen

Fig.1, Abb.1

CONTRA-INDICATIE

In uitzonderlijke gevallen kan dit product een
allergische reactie opwekken. Is dit het geval, stop dan
onmiddellijk met het gebruik en consulteer een arts.

GEBUIKSAANWIJZING

	Normal set	Fast set
Mengtijd	20-30 sec.	20-30 sec.
Totale verwerkingstijd	90 sec.	70 sec.
Uithardingstijd	180 sec.	150 sec.
Minimum tijd in de mond	120 sec.	90 sec.

1. Voor gebruik de poeder losschudden. Neem de
benodigde hoeveelheid poeder en water. De
standaard verhouding poeder - water is: 1 maatlepel
(8,4g) op een 1/2 maatbeker (20ml) water (Fig. 1).
2. Meng gedurende 20-30 seconden. Vul de
afdruklepel met het mengsel (Fig. 2).
3. Plaats de gevulde afdruklepel in de mond.
Raadpleeg bovenstaande tabel voor de totale
verwerkingstijden (Fig. 3).
4. Wacht tot het materiaal is uitgehard. Raadpleeg de
bovenstaande tabel voor de minimum tijd in de mond.
5. Verwijder de afdruk en spoel deze uit onder
stromend kraanwater (Fig. 4).

OPMERKINGEN:

1. Hogere temperaturen van het mengwater
verkorten de uithardings- en de totale
verwerkingstijd.
2. Variaties in waterhardheid beïnvloeden de
uithardingstijd.

DESINFECTEREN

Gedurende 15 minuten onderdompelen in een 0,5%
chlooroplossing is de aanbevolen desinfectiemethode.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
desbetreffende fabrikant.

VERVAARDIGEN VAN EEN GIPSMODEL

1. Verwijder overtollig water alvorens uit te gieten in
gips. Het meest nauwkeurige resultaat wordt
verkregen door direct na het uitspoelen uit te gieten
(Fig. 5).
2. Als de afdruk niet direct kan worden uitgegoten
verpak hem dan in een bevochtigde
papierenhanddoek of bewaar hem in een luchtdicht
afgesloten plasticzakje. NIET IN WATER OPSLAAN.
3. AROMA FINE PLUS is compatibel met Klasse III en
Klasse IV gips (GC Fuji ROCK™ EP).

OPSLAG

Opslaan op een koele en droge plaats, in een goed af
te sluiten container (4-25°C) (39,2-77,0°F).
(Houdbaarheid: tot 3 jaar na productiedatum).

VOORZORGSMaatregelen

1. In geval van contact van het materiaal of het
mengsel ervan met de ogen, spoel deze
onmiddellijk met water en zoek medisch hulp.
2. Wanneer het materiaal wordt gebruikt draag dan
een stofmasker om inademen van poeder te
voorkomen.
3. Breng na opening de inhoud van de verpakking over
in een daarvoor geschikte container.
4. Meng het materiaal niet met andere producten.

Laatste herziening : 05/2011