

GEBRUIKSAANWIJZING

Indicatie

Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free is een materiaal voor het afdrukken van de onbetande kaak. De gemengde afdrukpasta vloeit heel gemakkelijk onder lichte druk, waardoor tijdens de afdrukname geen vervorming van zachte weefsels optreedt en alle details nauwkeurig worden gereproduceerd.

Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free is daarom in het bijzonder geschikt voor “rebasen” en voor de tweede afdruk met de individuele lepel.

Het bevat geen eugenol en is daarom patiëntvriendelijk.

Dosering

Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free wordt aangeboden als een 2 pasta-systeem in de contrasterende kleuren blauw en wit. Door het uitknippen van strengen van gelijke lengte worden de pasta's in de juiste aanmaakverhouding gedoseerd: 1 g blauwe pasta op 2,2 g witte pasta.

N.B. In elke andere mengverhouding verloopt de uitharding trager.

Mengtijd

Meng de beide pasta's op het bijgeleverde mengblok met een stevige roestvrijstalen spatel goed dooreen tot een homogene kleur is verkregen. Dit neemt ongeveer 30 sec. in beslag.

De spatel kan het beste voor uitharding worden gereinigd met een tissue.

Het nemen van de afdruk

Breng de gemengde pasta aan in de prothese of in de afdruklepel en plaats deze binnen 1½ minuut na het mengen onder lichte druk in de mond. De uithardingstijd in de mond bedraagt 2-3 minuten. Neem de lepel voorzichtig uit de mond en spoel de afdruk zorgvuldig af met koud stromend water.

Uitgieten met gips

De afdruk kan direct met gips worden uitgegoten. De afdrukken blijven gedurende 7 dagen dimensioneel stabiel.

Eigenschappen

Gemeten volgens ADA specificatie No.16 zijn de voor Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free typische voorwaarden:

Consistency	33	mm
Initial setting time	3	min.
Final setting time	4	min.
Penetration hardness	1,3	mm
Cast surface	complies	

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Bewaren onder 25°C