

Materiaalbeschrijving

Cenit L is een lichtuithardende PMMA-kunststof in doseerspuiten.

Toepassing:

Cenit L is prima geschikt door de speciaal ingestelde thixotropie als plaatshouder en voor het aanbrengen van reservoirs bij het vervaardigen van medicamentdragers en bleeklepels. Een precieze bepaling van de laagdikte is door de toename van kleurintensiteit makkelijk mogelijk. Verdere toepasingsmogelijkheden zijn het opvullen van luchtblazen in het werkmodel of het beschermen van buurelementen en aangrenzend tandvlees bij zandstraalwerkzaamheden in de mond gebruikt worden.

Verwerking:

- Breng de benodigde hoeveelheid **Cenit L** aan op de te repareren of te bedekken modelgebied en modelleer eventueel met een penseel.
- Voor het polymeriseren zet het model in een licht-apparaat (bijv. **EyeVolution**) met een bereik van 300–500 nm. Afhankelijk van de lichtsterkte tussen de 3 en 5 minuten.
- Na de uitharding van **Cenit L** kan met behulp van een zachte doek en een schoonmaakmiddel op basis van alcohol de smeerlaag verwijderd worden.
- Na gebruik van de spuit de zuiger voorzichtig terug-trekken om de doseertip te legen dit om een polymerisatie van het materiaal in de tip te vermijden.

Voor kinderen ontoegankelijk bewaren!

Alleen voor tandheelkundige doeleinden gebruiken!

Opslagvoorwaarde:

Voor licht beschermen bij kamertemperatuur.

Houdbaarheid: zie houdbaarheidsdatum

Chargennummer / Houdbaarheidsdatum

Het chargennummer en de houdbaarheidsdatum bevinden zich op iedere verpakking van Cenit L. Bij een opmerking over het product a.u.b. altijd het chargennummer van het product aangeven. Gebruik het product niet meer na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Leveringsvorm:

REF	D3815	4 spuiten a 2,5 gram + 8 doseertips
-----	--------------	--

Het materiaal werd speciaal voor het dentale bereik ontwikkeld en moet volgens de gebruiksaanwijzingen verwerkt worden. Voor schade die ontstaan door ander of foutief gebruik en door niet juiste verwerkingswijzen draagt de fabrikant geen verantwoording. Bovendien is de fabrikant verplicht het materiaal, op zijn gebruiksmogelijkheden en voor welke toepassingen / doeleinden het geschikt is te onderzoeken, vooral ook wanneer deze niet vermeld zijn in de gebruiksaanwijzing.

Statuut van de informatie: 03.2018