

| Optosil®/ Xantopren® | EN ISO 4823 | Kleur | Doserings*2 | | | Mengtijd s | Tijd in de mond*1 min : s | Minimal verblijfsduur in de mond min : s |
|-------------------------|----------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| | | | BASE | Activator universal Plus | | | | |
| | | | | Liquid | Paste | | | |
| Optosil® Comfort® | Type 0 | geel | 1 lepel (10,7g/9,5 ml) | 6-8 druppels (0,14g/0,13 ml) | 6-8 streepjes (0,32g/0,29 ml) | 30 | 1:00 | 4:00 |
| Optosil® P Plus | Type 0 | geel | 1 lepel (14,4g/9,5 ml) | 4-6 druppels (0,09g/0,09 ml) | 4-6 streepjes (0,21g/0,19 ml) | 30 | 1:00 | 4:00 |
| Xantopren® H green | Type 1 | groen | 6 streepjes (11,0g/8,8 ml) | 12 druppels (0,27g/0,26 ml) | 12 streepjes (0,65g/0,59 ml) | 30 | 1:00 | 4:00 |
| Xantopren® M mucosa | Type 2 | oranje | 12 streepjes (9,0g/7,6 ml) | 12 druppels (0,27g/0,26 ml) | 12 streepjes (0,65g/0,59 ml) | 30 | 1:30 | 4:00 |
| Xantopren® L*4 blue | Type 3 | blauw | 12 streepjes*3 (8,6g/7,6 ml) | 12 druppels (0,27g/0,26 ml) | 12 streepjes (0,65g/0,59 ml) | 30 | 1:30 | 4:00 |
| Xantopren® VL*4 Plus | Type 3 | blauw | 12 streepjes*3 (8,5g/7,6 ml) | 12 druppels (0,27g/0,26 ml) | 12 streepjes (0,65g/0,59 ml) | 30 | 1:30 | 4:00 |

*1 Op basis van kamertemperatuur 23°C (73°F), 50% relatieve vochtigheid.

Bij hogere temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen langzamer.

*2 Op basis van mengblok en mengspatel (1 streepje = 1,3 cm)

*3 Mengbakje onderste ring komt overeen met 7,6 ml

*4 Bij gebruik van de dispenser: 1 slag (4,5 g / 4,0 ml) + 6 druppels (0,14 g / 0,13 ml)

Houd u aan de dosering.

Type 0 = kneedbare consistentie

Type 1 = dikvloeibare consistentie

Type 2 = middelmatig vloeibare consistentie

Type 3 = dunvloeibare consistentie

Gebruiksaanwijzing

Het **Optosil®/Xantopren® assortiment** is een perfect op elkaar afgestemd systeem. De vele varianten kunnen individueel worden gecombineerd voor alle afdruchtechnieken. Wij raden u aan **Optosil®/Xantopren®** niet met andere siliconenmaterialen te combineren. Voor eerste gebruik visueel op beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt. Na gebruik goed sluiten.

Het vervaardigen van het model:

De afdruk kan reeds na 30 minuten worden uitgegoten.
De afdruk kan max. 7 dagen dimensioneel stabiel bewaard worden.

Aanbevolen modelmateriaal:

Alle in de handel verkrijgbare modelmaterialen kunnen worden gebruikt.

Wij adviseren:

Klasse III gips, **MOLDANO®/MOLDADUR®**

Klasse IV gips, **MOLDASTONE®/MOLDASYNT®**

Galvaniseren:

De afdrukken laten zich in de gebruikelijke baden galvanisch verkoperen en verzilveren.

Desinfectie:

Afdrukken kunnen met waterige natriumhypochloride-oplossing (5,25%, tot 10 minuten*) en met andere voor siliconen geschikte desinfectiemiddelen behandeld worden. Let daarbij a.u.b. op de desinfectie/verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. *J Prosthet Dent*, 81, 621-4, 1999

Hechting:

Wij bevelen u het Heraeus Kulzer Universeel adhesief aan.

Opslag:

Niet boven 25°C (77°F).

Waarschuwing

Ontvlambaar. Door inademen kunnen gezondheidsrisico's ontstaan. Irriterend voor ogen, ademhalingsorganen en huid. Bij aanraking met de ogen met veel water uitspoelen en oogarts raadplegen. Huidcontact vermijden. Beschermende kleding dragen. **Draag geschikte handschoenen (EN 374, cat III, bijv. Dermatril fa. KCL, Duitsland)**. Niet inslikken of innemen. Indien na het inslikken van afdrukmetaal gezondheidsklachten optreden, waarschuw dan direct een arts. In zeldzame gevallen kan darmverstopping optreden. Overgevoelige personen kunnen een allergische reactie vertonen op het product. Niet aanbevolen voor patiënten die borstvoeding geven en voor kinderen die jonger zijn dan zes jaar. Toepassing alleen door opgeleid tandarts personeel.

Activator universal Plus: