

Multi-LC-tray

Multi-LC-tray is een eenvoudig te modelleren en sterk lichthardend individueel lepelmateriaal geschikt voor

- individuele lepels (voor de betande en gedeeltelijk betande kaak)
- functie lepels (voor de onbetande kaak)
- als basis voor stiften
- als basis voor beetmodellen en registratiehulp

Het materiaal is gebruiksklaar en eenvoudig in het gebruik. Zowel bij dag- als kunstlicht heeft u voldoende tijd om het materiaal te modelleren. Multi-LC-tray kan met alle daarvoor geschikte polymerisatie apparaten worden uitgehard: halogeen licht (ca.420-480 nm) of UV-licht (golflengte ca.350-400 nm).

De werkeigenschappen gedurende het vormen en na uitharding zijn uitstekend. Multi-LC-tray heeft een glad en niet plakkend oppervlak.

Toepassing:

Zorg ervoor dat de lepels op kamertemperatuur zijn voordat u met de werkzaamheden begint. Teken op het gipsmodel de individuele lepelrand. Eventueel het gipsmodel isoleren. Het vlies afnemen, de lepel op het model plaatsen en in vorm modelleren. Randen op de lijn afsnijden. Van het overvloedige materiaal kan een handvat gemaakt worden.

Uitharden:

Plaats het met lepelmateriaal bedekt model in een daartoe geschikte lichtapparaat (halogeen- of UV-licht). Uitharden gebeurt op het gipsmodel in het lichtapparaat.

De uithardingstijd bedraagt 3-5 minuten. Na het uitharden de lepel van het model afnemen, omdraaien en nog 3-5 minuten laten uitharden. Langere uithardingstijden verbeteren de fysieke eigenschappen van het materiaal (sterker). De uitgeharde lepel is nog geschikt voor gebruik en kan worden bewerkt. Het laagje dat ontstaat door zuurstofinwerking kan eenvoudig worden weggenomen met een alcoholhoudend doekje.

Opslag:

Bewaren bij kamertemperatuur, maximaal 25°C. Niet blootstellen aan licht.

Houdbaarheid:

3 Jaar, indien bewaard onder aanbevolen condities.