



Gebruiksaanwijzing

Palatray® XL

Productbeschrijving

Palatray XL is een lichtuithardend, buigstijf, vormstabiel ééncomponent-composiet in anatomisch geprefabriceerde envergroete plaatvorm.

Samenstelling

Hoogmoleculaire, multifunctionele meth-/acrylaten en anorganisch vulmateriaal.

Indicaties

- individuele afvormlepels
- functielepels
- beetsjablonen
- basisplaten voor wasprothese-opstellingen

Contra-indicaties

Bij bewezen allergie voor één of meer bestanddelen van Palatray XL mag dit product niet worden toegepast.

Opmerkingen

Uitsluitend voor gebruik zoals aangegeven in het tandheelkundig laboratorium. Het product bevat (meth-)acrylaatverbindingen, die bij huidcontact overgevoeligheid kunnen veroorzaken. Bij eventueel optredende irritaties of wanneer bekend is dat de persoon allergisch is voor harsen op basis van meth-/acrylaat, mag het product niet worden gebruikt.

Verwerking

Op het model het gewenste randverloop aftekenen en ondersnijdingen stoppen. Het model in water leggen en met eendunne laag Aislar® isoleren en laten drogen. Een Palatray XL-plaat nauwkeurig op het model aanbrengen en randen overeenkomstig de afgetekende grenzen afsnijden. Van het resterende materiaal kan een lepelhandgreep worden vervaardigd. Na de polymerisatie het werkstuk van het model nemen. De bewerking geschiedt met hardmetalen frezen. Er wordt aangeraden, hiertoe voor een afzuiging te werken.

Polymerisatie

HiLite® power:	180 s
Heraflash®:	180 s
UniXS®:	180 s

Werkstukken waarvoor in de polymerisatiebak (van bijv. UniXS) plaats is, kunnen rechtstreeks in het apparaat worden geplaatst.

Gevaren

Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk en grondig uitspoelen met ruim water en een oogarts raadplegen. Beschermende kleding dragen.

Bewaren

Niet boven 25°C (77°F) bewaren. Na afloop van de vervaldatum mag het materiaal niet meer worden gebruikt. Direct zonlicht vermijden. Verpakking na verwijdering van het product weer goed sluiten. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vóór het eerste gebruik visueel op beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt.

Afvoer

Bij de afvoer dienen de nationale voorschriften en het veiligheidsinformatieblad te worden opgevolgd.
(Verkrijgbaar op www.heraeus-dental.com of bij uw Heraeus-contactpersoon.)

® = geregistreerd handelsmerk van
Heraeus Kulzer GmbH

Status: 2012-09