

Blauw opaak en blauw transparant

Gebruiksaanwijzing

Produktomschrijving:

Individo Lux blauw opaak en **Individo Lux blauw transparant** zijn opake c.q. transparante lichtuithardende kunststof gevormde platen voor de boven- en onderkaak. Zij zijn bestemd voor het vervaardigen van individuele afdruk- en functielepels op het gebied van kronen-, bruggen en complete protheses, voor de vervaardiging van basisplaten voor beetsjablonen en voor het maken van beetregistraties. Zij zijn gebruiksklaar en zonder nare geuren makkelijk te verwerken.

Individo Lux kan bij kamer- en daglicht lang worden verwerkt en hardt snel uit onder halogeen- of UV-licht. De individuele lepels kunnen direct na de vervaardiging worden gebruikt.

Individo Lux heeft een aangenaam pepermuntaroma.

Toepassing:

Laat **Individo Lux** tijdig voor het gebruik op kamertemperatuur komen. Op het gipsmodel wordt de rand voor de individuele lepel gemarkeerd. Indien nodig uitblokken. Indien uitblokken niet nodig is, moet het gipsmodel geïsoleerd worden.

Schutfolie verwijderen en de plaat op het model plaatsen, vormen en aan de randen, overeenkomstig de markering, afsnijden. **Individo Lux blauw transparant** is doorzichtig waardoor het model exact kan worden gevormd.

De greep kan eenvoudig uit het overtollige materiaal worden gevormd.

Individo Lux wordt op het model in een gebruikelijk lichtapparaat (halogeen- of UV-licht) gepolymeriseerd.

Afhankelijk van de dikte van de gevormde lepel 3 à 5 min aan de achterkant verlichten. Door langere polymerisatie-tijden worden de fysische eigenschappen van het materiaal verbeterd. Uit dien hoofde dient de verlichtingstijd eventueel te worden verlengd.

De op deze wijze vervaardigde afdruklepel is direct klaar voor het gebruik c.q. kan direct worden bewerkt. Door lucht/zuurstof kan eventueel een inhibitielaag ontstaan. Deze kan eenvoudig worden verwijderd met een doek met alcohol.

Opslag:

Opslag bij een temperatuur tussen 4 °C - 23 °C.

Koel en donker bewaren!

Voorzorgsmaatregelen/nadere aanwijzingen:

Een te korte of te weinig intensieve belichting geeft verlies aan hardheid.

Individo Lux bevat Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, pepermuntolie en BHT. Bij bekende overgevoeligheden (allergien) voor de inhoudsstoffen in **Individo Lux** moet van het gebruik afgezien worden.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.