

C-PLAST LEPELMATERIAAL

Geachte klant,

U hebt een medisch product in handen dat voldoet aan de norm 93/42/EEG. Gelieve bij ontvangst van het product onmiddellijk het lotnummer en de overeenkomstige productnaam op te nemen in uw administratie en bij ieder uitgevoerd werk de gebruikte materialen en het overeenkomstige lotnummer te vermelden. Bovendien vragen wij u ook om voor uw eigen bescherming, voor die van uw patiënten en voor die van het milieu de voorschriften uit de onderhavige gebruiksaanwijzing na te leven.

Productbeschrijving

Het koud polymeriserende C-PLAST is bij uitstek geschikt voor het maken van individuele lepels, individuele basis platen en registreer platen. C-PLAST kan met de meeste afdrukmaterialen en de bijbehorende adhesieven gebruikt worden. Teneinde een optimaal resultaat te bereiken, gaarne de gebruiksaanwijzing lezen.

NL

67

Wit

C-PLAST is een koud polymeriserende precisie kunststof. Voor het maken van registreer platen, individuele afdruklepels precisie basisplaten voor beetsjablonen.

Kleur 34

C-plast is een koud polymeriserende precisie kunststof. Speciaal voor het maken basis platen voor het passen van totale protheses.

Samenstelling / Poeder

Polymethylmethacrylaat, polyethylmethacrylaat, copolymeer, calciumcarbonaat, katalysator, pigmenten

Samenstelling / Vloeistof

Methylmethacrylaat, paraffineolie, katalysator

NL

69

Voorschriften voor opslag

- Beschermd tegen licht, ruimtetemperatuur: 2–28 °C
- Producten na afloop van de vervaldatum niet meer gebruiken.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Monomeerhouders op een donkere, koele en goed geluchte plaats bewaren.

Indicatie

- Individuele lepels
- Individuele basisplaten voor:
 - Wassen beetsjablonen, intraorale registreerplaten, tandopstelling met was
- Vervaardiging van individuele tandvoeringsverdelers

Contra-indicatie

- Mag niet direct in de mond worden verwerkt
- Niet geschikt voor alginaten en hydrocolloïde
- In geval van allergie tegen bestanddelen van C-PLAST dient afgezien te worden van het gebruik van het product.

Bijwerkingen

Systemische bijwerkingen zijn tot dusverre niet bekend.

NL

71

Gevaren

- Monomeer bevat methylmethacrylaat (MMA)
- MMA kan irritatie veroorzaken en is licht ontvlambaar (ontbrandingspunt: + 10 °C)
- MMA en de dampen ervan irriteert de ogen, de ademenwegen en de huid
- Sensibilisering door huidcontact is mogelijk
- Dampen niet inademen
- Verhouden van ontstekingsbronnen – niet roken
- Niet in de riolering laten komen

- Vermijd contact van het monomeer en onuitgehard materiaal met de huid. Veel gebru