

Product beschrijving

Tandheelkundige thermoformende film voor het maken van individuele afdruklepels en tevens van basisplaten voor beetregistraties of set-ups.

Toepassingsgebieden

Drufoplast is bijzonder geschikt voor het maken van individuele lepels alsook van basen voor bijtsjablonen of opstellingen.

Eigenschappen

Ø 120 mm / 125 mm

Dikte 2,0 mm / 3,0 mm

Kleuren

Natuur / rosa

Kenwaarden materiaal

Dichtheid: 1,18 g / cm³
 Buigvastheid: 39,00 N / mm²
 Scheuruitzetting: > 30 %
 Wateropname: < 0,1 %
 Verzachtingstemperatuur: > 70°C

Verwerking

Inleggen van de plaat in een vacuüm- of drukvormtoestel (Vacformat / Druformat). Gipsmodellen moeten voor het dieptrekken gespoeld worden, concave delen moeten met van een hittebestendig materiaal (b.v. Fillin) voorzien worden. De opwarmingstijden bedragen naargelang het toestel en de materiaaldikte tussen 1:05 en 1:50 minuten. Door vacuüm- of drukinwerking wordt de geplastificeerde plaat tegen het model gevormd. De afkoelfase onder druk moet minstens zo lang duren als de opwarmingsfase. Drufoplast kan met hartmetaalfrezen bewerkt worden. Voor het gladmaken van de freessnedes zijn speciale flexibele slijpschijven geschikt (UltraTrim). Voor het maken van individuele lepels staan handgrepen uit hetzelfde materiaal ter beschikking die met hitte aangepast en met een chemische bonding (TrayFix) verbonden kunnen worden.

Informatie i.v.m. de gezondheid

Drufoplast draagt een CE-teken en voldoet hierdoor aan de fundamentele vereisten van de medische productrichtlijn.

Voor kinderen ontoegankelijk bewaren!

Alleen voor tandheelkundige doeleinden gebruiken!

Opslagereisen

Bij kamertemperatuur, 18°C–28°C

Houdbaarheid: zie vervaldatum.

Drufoplast niet gebruiken na het verstrijken van de vervaldatum.

Leveringsvorm

REF D4210Z	Drufoplast rosa 120 x 2 mm / 15 stuks
REF D4214	Drufoplast natuur 120 x 3 mm / 10 stuks met ingespoten handvat
REF D4215	Drufoplast natuur 120 x 3 mm / 100 stuks met ingespoten handvat

Het materiaal werd speciaal voor het dentale bereik ontwikkeld en moet volgens de gebruiksaanwijzingen verwerkt worden. Voor schade die ontstaan door ander of foutief gebruik en door niet juiste verwerkingswijzen draagt de fabrikant geen verantwoording. Bovendien is de fabrikant verplicht het materiaal, op zijn gebruiksmogelijkheden en voor welke toepassingen / doeleinden het geschikt is te onderzoeken, vooral ook wanneer deze niet vermeld zijn in de gebruiksaanwijzing.



Rx only



Dreve Dentamid GmbH
 Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna / Germany
 Tel +49 2303 88 07-40 · Fax +49 2303 8807-55
 dentamid@dreve.de · www.dentamid.dreve.de