

Bedoeld gebruik

Dieptrekplaat voor het maken van functionele dragers.

Materiaalbeschrijving

Zachte / harde dieptrekplaat van polyethyleentereftalaat en ethylvinylacetaat voor de productie van comfortabele en functionele dragers. Het hoge draagcomfort leidt tot de grootst mogelijke therapiezeekerheid.

Toepassingsgebied

De drager is geschikt als tijdelijke drager bij myorthropathieën (spier- / kaakgewrichtklachten) en daaruit resulterende parafuncties zoals klemmen, knarsen enz. De drager vormt een zeer comfortabel hypomochlion (bijstop, steunpunt van een hendel). Hij spant niet, is gemakkelijk te maken en verankerings-elementen zijn niet nodig. Goede zit door klikeffect. De variant van 3 mm wordt in het DocSnoreNix®-systeem als functionele drager gebruikt.

Verwerking

Alle materialen van Kombiplast worden per direct met een isolatiefolie geleverd! Deze extreem dunne folie (0,07 mm) wordt aan de modelzijde samen met Kombiplast diepgetrokken en garandeert een duidelijk verbeterde transparantie van de drager. Een extra isolering van het modeloppervlak is niet meer nodig. De verwarming van de Kombiplastfolie vindt aan de verharde zijde plaats (alleen voor drukvormapparaten geschikt). De instelling van de verwarmings- en afkoeltijden staat op de foliewaaier of kan door het apparaat via de barcodes op de verpakking worden ingelezen.

Beschermen tegen vocht en natheid, en aangebroken verpakkingen altijd afsluiten met de meegeleverde aluminium zak.

Chargennummer / Houdbaarheidsdatum: Het chargennummer en de houdbaarheidsdatum bevinden zich op iedere verpakking van Kombiplast. Bij een opmerking over het product a.u.b. altijd het chargennummer van het product aangeven. Gebruik het product niet meer na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Bij gebruik van een Druformat- of Drufosmart-scan a.u.b. de bijgevoegde speciale informatie in acht nemen.

De folie kan worden opgebouwd met autopolymerisaat. De zachte folie mag niet in contact komen met PMMA of andere alcoholhoudende reinigingsmiddelen.

Mogelijke gevaren

Neem bij het gebruik van Kombiplast het veiligheidsgegevensblad in acht.

Houdbaarheid

2 jaar in de gesloten originele verpakking.

Geleverde vormen

Ø 120 mm, helder transparent
(speciale maten op aanvraag leverbaar).

REF D420016

2 mm (1,0 mm hard / 1,0 mm zacht)
10 stuks

REF D420017

3 mm (1,5 mm hard / 1,5 mm zacht)
10 stuks

REF D420018

4 mm (3,0 mm hard / 1,0 mm zacht)
10 stuks

Het product is ontwikkeld voor het gebruik in de tandheelkunde en moet overeenkomstig gebruiksgegevens worden toegepast. Voor schade die door niet correct of verkeerd gebruik ontstaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast is de gebruiker verplicht het product, op eigen verantwoordelijkheid, vóór het gebruik te controleren op geschiktheid en de toepassingen waarvoor het product bedoeld is, met name als de toepassing niet in de gebruiksaanwijzing staat.



Rx only



Drewe Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna / Germany
Tel +49 2303 88 07-40 · Fax +49 2303 8807-55
dentamid@drewe.de · www.dentamid.drewe.de