

Materiaalomschrijving

Zeer transparante, licht elastische dieptrekfolie van polyethyleen voor het maken van tandheelkundige lepel en dragers. Verbindt zich met acrylaat.

Toepassingsgebied

Geschikt voor het maken van stabiele, bij de tandvleesrand eindigende bleeklepels en medicamentendragers, ook te gebruiken voor kleine ondersnijdingen.

Verwerking

BioBleach® hard wordt vanaf nu met een isolatiefolie geleverd!

Deze extreem dunne folie (0,07 mm) wordt aan de kant van het model samen met **BioBleach® hard** diepgetrokken en staat garant voor een duidelijk verbeterde transparantie van de lepel. Een extra isolatie van het oppervlak van het model is niet meer nodig.

Voor de verwerking in de Vacformat moet de isolatiefolie vóór het dieptrekken worden verwijderd.

De instellingen van de verwarmings- en afkoeltijden kunnen ofwel uit de foliewaaier worden overgenomen, of met behulp van de op de verpakking aangebrachte barcodes in het apparaat worden ingelezen.

Op de te bleken labiale gebieden van de gebits-elementen moet voor het dieptrekken van de folie een plaatshouder worden aangebracht als reservoirvormer voor het bleekmateriaal.

a) Met het lichtuithardende uitblokmateriaal **Cenit L** (REF D3815) worden de te bleken gebieden op het gipsmodel gelijkmatig afgedekt en vervolgens uitgehard.

b) Het volledige model wordt met de dieptrekfolie **Drufolen W** 0,8 mm (REF D423481N) overtrokken. Vervolgens wordt het te bleken deel van het model (incl. een lichte overlapping van de incisale randen) met een schaar uit de folie geknipt en weer op het model geplaatst.

BELANGRIJK: Om het contact tussen slijmvlies en bleekmateriaal op een betrouwbare manier te voorkomen, moet het einde van de plaatshouder zich ca. 1 mm voor de gingivarand bevinden.

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Alleen gebruiken voor tandheelkundige toepassingen!

op eigen verantwoordelijkheid, vóór het gebruik te controleren op geschiktheid en de toepassingen waarvoor het product bedoeld is, met name als de toepassing niet in de gebruiksaanwijzing staat.

Opslagcondities

Bij kamertemperatuur, d.w.z. 18–28 °C, opslaan.

Houdbaarheid: zie houdbaarheidsdatum.

BioBleach® hard na afloop van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken.

Beschermen tegen vocht / niet met water in aanraking brengen. Geopende verpakkingen altijd opnieuw sluiten met de meegeleverde aluminiumzak.

Leveringsvorm

Ø 120 mm, helder transparant (speciale afmetingen leverbaar op aanvraag).

REF D420015

BioBleach® hard

0,5 mm 25 stuks

Het product is ontwikkeld voor het gebruik in de tandheelkunde en moet overeenkomstig gebruiksgegevens worden toegepast. Voor schade die door niet correct of verkeerd gebruik ontstaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast is de gebruiker verplicht het product,