

Bedoeld gebruik

Dieptrekplaat voor het maken van functionele occlusie-dragers.

Materiaalbeschrijving

Zeer transparante, elastische dieptrekplaat van polyethyleentereftalaat glycol voor de productie van dragers. Gaat een verbinding aan met acrylaat.

Toepassingsgebied

Is geschikt voor het maken van basen voor occlusiedragers en orthodontie-apparaten, harde dragers, medicatiedragers, orthodontische hulpmiddelen en afdekplaten.

Verwerking

Alle materialen van Biolon worden per direct met een isolatiefolie geleverd!

Deze extreem dunne folie (0,07 mm) wordt aan de modelzijde samen met Biolon diepgetrokken en garandeert een duidelijk verbeterde transparantie van de drager. Een extra isolering van het modeloppervlak is niet meer nodig.

Voor de verwerking in Vacformat moet de isolatiefolie vóór het dieptrekken worden verwijderd.

De instelling van de verwarmings- en afkoeltijden staat op de foliewaaier of kan door het apparaat via de barcodes op de verpakking worden ingelezen.

Bij gebruik van een Druformat- of Drufosmart-scan a.u.b. de bijgevoegde speciale informatie in acht nemen. Voor noodzakelijke vulwerkzaamheden aan het model adviseer wij Cenit L (REF D3815).

Beschermen tegen vocht en natheid, en aangebroken verpakkingen altijd afsluiten met de meegeleverde aluminium zak.

Chargennummer / Houdbaarheidsdatum: Het chargennummer en de houdbaarheidsdatum bevinden zich op iedere verpakking van Biolon. Bij een opmerking over het product a.u.b. altijd het chargennummer van het product aangeven. Gebruik het product niet meer na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

De van Biolon gemaakte dragers kunnen worden opgebouwd met acryl kunststoffen die in de tandheelkunde worden gebruikt.

Mogelijke gevaren

Neem bij het gebruik van Biolon het veiligheidsgegevensblad in acht.

Houdbaarheid

2 jaar in de gesloten originele verpakking.

Geleverde vorm

Ø 120 mm, helder transparant (speciale maten op aanvraag leverbaar).

REF	D420001	0,5 mm	25 stuks
REF	D420002	0,5 mm	50 stuks
REF	D420019	0,625 mm	20 stuks
REF	D420020	0,625 mm	40 stuks
REF	D420003	0,75 mm	20 stuks
REF	D420004	0,75 mm	40 stuks
REF	D420005	1 mm	25 stuks
REF	D420006	1 mm	50 stuks
REF	D420007	1,5 mm	30 stuks
REF	D420008	1,5 mm	60 stuks
REF	D420009	2 mm	20 stuks
REF	D420010	2 mm	60 stuks
REF	D420011	3 mm	10 stuks
REF	D420012	3 mm	50 stuks

Het product is ontwikkeld voor het gebruik in de tandheelkunde en moet overeenkomstig gebruiksgegevens worden toegepast. Voor schade die door niet correct of verkeerd gebruik ontstaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast is de gebruiker verplicht het product, op eigen verantwoordelijkheid, vóór het gebruik te controleren op geschiktheid en de toepassingen waarvoor het product bedoeld is, met name als de toepassing niet in de gebruiksaanwijzing staat.