

Bedoeld gebruik

Tandheelkundige thermoformende film

Eigenschappen

Flexibel, zacht blijvende kunststof

Ø 120 mm / 125 mm

□ 120 mm / 125 mm

Dikte

1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm

Kleuren

Natuur-transparant – 3 mm platen ook in diverse kleuren leverbaar.

Eigenschappen

S.G. :	0,95 g/cm ³
Verwerkings temperatuur:	ca. 43 °C
Treksterkte:	33 MPa
Scheursterkte:	> 18 N/mm ²
Uitrekking tot breuk:	850 %
Hardheid:	82 shore A
Wateropname:	< 0,2 %

Toepassingen

Dupliceren van modellen, zachte spalken, positioners, mondbeschermers of bleeklepels.

Verwerking

Voor de verwerking van de DrufoSoftplaten zijn alle Dreve dieptrekapparaten (DrufoMat scan, DrufoSmart scan, DrufoSmart, DrufoMat SQ / TE, VacfoMat U / P, VacfoMat 2000) geschikt. De plaat

wordt om te plastificeren in de spanring gelegd en doormiddel van de warmtestraler op de juiste temperatuur gebracht. De tijden variëren afhankelijk van apparaattype en omgevingstemperatuur tussen de 1:30 en 2:45 minuten. Na afsluiting van de verwarmfase hangt het materiaal duidelijk door en dan kunt u het dieptrekproces starten. Gipsmodellen moeten vooraf gewaterd en geïsoleerd worden. De afkoelfase onder druk / vacuum bedraagt 3–8:30 minuten afhankelijk van de plaatdikte. DrufoSoft® kan na de afkoeling met een schaar of een warme scalpel gesneden worden. DrufoSoft® is geschikt voor het "additiven dieptrekken". Door het lamineerproces kunnen meerdere folies met elkaar versmolten worden. (DrufoMat TE / SQ).

Gezondheids informatie

DrufoSoft® draagt een CE teken en vervult daarmee de eisen van de medische producten richtlijn.

Voor kinderen ontoegankelijk bewaren!

Alleen voor tandheelkundige doeleinden gebruiken!

Opslagvoorwaarde

Bij kamertemperatuur, h. Bewaren bij 18–28 °C.

Houdbaarheid: zie houdbaarheidsdatum.

DrufoSoft® na afloop van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken.

Het product is ontwikkeld voor het gebruik in de tandheelkunde en moet overeenkomstig gebruiksgegevens worden toegepast. Voor schade die door niet correct of verkeerd gebruik ontstaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast is de

gebruiker verplicht het product, op eigen verantwoordelijkheid, vóór het gebruik te controleren op geschiktheid en de toepassingen waarvoor het product bedoeld is, met name als de toepassing niet in de gebruiksaanwijzing staat.



Rx only



Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna / Germany
Tel +49 2303 88 07-40 · Fax +49 2303 8807-55
dentamid@dreve.de · www.dentamid.dreve.de