

Optosil®/ Xantopren®	EN ISO 4823	Kleur	Dosering*2			Mengtijd	Tijd in de mond*1	Minimal verblijfsduur in de mond
			BASE	Activator universal Plus				
				Liquid	Paste			
						s	min : s	min : s
Optosil® Comfort®	Type 0	geel	1 lepel (10,7 g/9,5 ml)	6-8 druppels (0,14 g/0,13 ml)	6-8 streepjes (0,32 g/0,29 ml)	30	1:00	4:00
Optosil® P Plus	Type 0	geel	1 lepel (14,4 g/9,5 ml)	4-6 druppels (0,09 g/0,09 ml)	4-6 streepjes (0,21 g/0,19 ml)	30	1:00	4:00
Xantopren® H green	Type 1	groen	6 streepjes (11,0 g/8,8 ml)	12 druppels (0,27 g/0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g/0,59 ml)	30	1:00	4:00
Xantopren® M mucosa	Type 2	oranje	12 streepjes (9,0 g/7,6 ml)	12 druppels (0,27 g/0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00
Xantopren® L *4 blue	Type 3	blauw	12 streepjes*3 (8,6 g/7,6 ml)	12 druppels (0,27 g/0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00
Xantopren® VL *4 Plus	Type 3	blauw	12 streepjes*3 (8,5 g/7,6 ml)	12 druppels (0,27 g/0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00

*1 Op basis van kamertemperatuur 23°C (73°F), 50% relatieve vochtigheid.

Bij hogere temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen langzamer.

*2 Op basis van mengblok en mengspatel (1 streepje = 1,3 cm)

*3 Mengbakje onderste ring komt overeen met 7,6 ml

*4 Bij gebruik van de dispenser: 1 slag (4,5 g / 4,0 ml) + 6 druppels (0,14 g / 0,13 ml)

Houd u aan de dosering.

Type 0 = kneedbare consistentie

Type 1 = dikvloeibare consistentie

Type 2 = middelmatig vloeibare consistentie

Type 3 = dunvloeibare consistentie

Gebruiksaanwijzing

Het **Optosil®/Xantopren® assortiment** is een perfect op elkaar afgestemd systeem. De vele varianten kunnen individueel worden gecombineerd voor alle afdruktechnieken. Wij raden u aan **Optosil®/Xantopren®** niet met andere siliconenmaterialen te combineren. Voor eerste gebruik visueel op beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt. Na gebruik goed sluiten.

Het vervaardigen van het model:

De afdruk kan reeds na 30 minuten worden uitgegoten.
De afdruk kan max. 7 dagen dimensioneel stabiel bewaard worden.

Aanbevolen modelmateriaal:

Alle in de handel verkrijgbare modelmaterialen kunnen worden gebruikt.
Wij adviseren:
Klasse III gips, MOLDANO®/MOLDADUR®
Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galvaniseren:

De afdrukken laten zich in de gebruikelijke baden galvanisch verkoperen en verzilveren.

Desinfectie:

Afdrukken kunnen met waterige natriumhypochloride-oplossing (5,25 %, tot 10 minuten*) en met andere voor siliconen geschikte desinfectiemiddelen behandeld worden. Let daarbij a.u.b. op de desinfectie/ verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Hechting:

Wij bevelen u het Kulzer Universeel adhesief aan.

Opslag:

Niet boven 25°C (77°F).

Waarschuwing

Activator universal Plus:

Ontvlambaar. Door inademen kunnen gezondheidsrisico's ontstaan. Irriterend voor ogen, ademhalingsorganen en huid. Bij aanraking met de ogen met veel water uitspoelen en oogarts raadplegen. Huidcontact vermijden. **Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen (EN 374, cat III, bij v. Dermatril fa. KCL, Duitsland).** Niet inslikken of innemen. Indien na het inslikken van afdruk materiaal gezondheidsklachten optreden, waarschuw dan direct een arts. In zeldzame gevallen kan darmverstopping optreden. Overgevoelige personen kunnen een allergische reactie vertonen op het product. Niet gebruiken bij patiënten die zwanger zijn of borstvoeding geven, of bij kinderen jonger dan 6 jaar. Toepassing alleen door opgeleid tandartspersoneel.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Status: 2016-07