



Innocid® RSD-i 70 Sproei- en Wisdesinfectie PLUS

De aangenaam sneldesinfectans



Waarom Innocid® RSD-i 70 toepassen

Innocid® RSD-i 70 is een eenvoudig en snel werkend desinfectans met milde eigenschappen voor veelvuldig gebruik.

Met een breed werkspectrum en een werking binnen 30 sec. is Innocid® RSD-i 70 Oppervlakte desinfectans PLUS een praktisch en snel middel voor oppervlakte desinfectie. Bovendien bevat het geen aldehyden, fenolen en quaternaire ammoniumverbindingen en is dus te gebruiken voor gevoelige gebruikers.

Waar Innocid® RSD-i 70 toepassen

Innocid® RSD-i 70 oppervlakte desinfectans PLUS is een gebruiksklare desinfectans voor oppervlakten in de medische, tandheelkundige en tandprothetische praktijk.

Hoe Innocid® RSD-i 70 toepassen

1. Niet gebruiken op alcohol onbestendig materiaal (bijv. niet geschikt voor acrylglas)
2. De desinfectans is gebruiksklaar en wordt vanaf 30 cm afstand op het te deinfecteren oppervlak gespoten totdat het helemaal is bevochtigd, c.q. op een kleurloze doek wordt ingespoten en hiermee het oppervlak mee ingewreven.
3. Laten inwerken op de volledig bevochtigde en desinfecteren oppervlakten.

- Werkzaam binnen 30 seconden.

- Milde eigenschappen (geschikt voor gevoelige gebruikers)

- Vrij van aldehyden, fenolen en quaternaire ammoniumverbindingen

- RSD-i 70 is een bactericide, fungicide*, tuberculocide en virucide**

* C.albicans

** Virussen met virusenvelop en Norovirussen

Chemische gegevens Innocid® RSD-i 70

Bevat Ethanol (C₂H₅OH) en 1-Propanol (C₃H₇OH).
pH lager dan 10
Kleur Kleurloos
Geur Lemon

Microbiologische gegevens Innocid® RSD-i 70

Innocid® RSD-i 70 oppervlakte desinfectans PLUS is een bactericide, fungicide, tuberculocide en virucide¹

Bacteriën (incl. MRSA) ²	30 sec.
Fungi (C. albicans)	30 sec.
TbB (M. terrae)	30 sec.
Virussen (virussen met virusenvelop)	30 sec.
Rota- en Adenovirussen	30 sec.
Virussen (op de DVV)	2 min.
Norovirussen	1 min.

Getest op: VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, EN 1275, EN 14348, BGA (RKI) / DVV, DVV, EN 14476.

Testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

¹ Het virusenvelop is een bij bepaalde virussen, bijvoorbeeld HBV, HCV, HDV, HIV, Influenza type A, B, C (vogelgriep), pokken virussen, herpes simplex virus, varicella zoster virus, humaan Herpes virussen, humaan T-lymphotrope virus en ebola virus, voorkomende uitwendige structuur, die bestaat uit lipiden van een lipide dubbelmembraan, gemaakt met materiaal uit gastheercellen en de daarin opgeslagen virale eiwitten. Alle Innocid® desinfectie producten beschermen tegen het volledige spectrum van virussen met een virusenvelop.

² Alle Staphylococcus aureus stammen, die resistent zijn tegen alle varianten van penicilline β-lactam antibiotica, worden aangeduid als zogenaamde "ziekenhuis bugs" MRSA (methicilline resistente Staphylococcus Aureus). Alle Innocid® desinfectie middelen zijn effectief tegen alle vormen van Staphylococcus aureus en beschermen tegen MRSA.