

OMSCHRIJVING

Cavex Bite&White ExSense is een gel op waterbasis met munt aroma en bevat hydroxyapatiet en kaliumnitraat. Cavex Bite&White ExSense vermindert gevoeligheid en versterkt de witheid in tanden dankzij hydroxyapatiet remineralisatie.

VERPAKKING

Tube 42 ml – 50 gram (voldoende voor circa 20 behandelingen)

SAMENSTELLING

Hoofdbestanddelen: hydroxyapatiet 2%, kaliumnitraat 0,1%

INDICATIES VOOR GEBRUIK

- Na het bleken van tanden in de tandheelkundige praktijk en/of thuis.
- Na een professionele reinigingsbeurt van het gebit.
- Voorkomen en verminderen van gevoeligheid.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik Cavex Bite&White ExSense niet bij een allergie voor munt of een van de overige bestanddelen.

PROCEDURE VOOR GEBRUIK

- Tandens voorbereiden en reinigen door poetsen en flossen.

TOEPASSING:

ZONDER TRAY:

Was de handen grondig met water en zeep. Breng een kleine hoeveelheid Cavex Bite&White ExSense aan op een schone vinger. Verdeel de gel rustig over alle vlakken van de boven- en ondertanden. Laat de gel 10 minuten inwerken. Spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond met water.

MET TRAY:

Breng een streepje Cavex Bite&White ExSense aan op de gehele tray. Breng de tray in en draai deze rustig naar links en rechts, zodat de gel goed over de tanden wordt verdeeld. Bijt dan langzaam op de tray

en laat de gel 10 minuten inwerken. Verwijder de tray, spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond met water. Spoel de tray af met koud water.

- Draai de dop na gebruik altijd meteen op de tube.
- Voor optimale resultaten: minstens 30 minuten na de behandeling niet eten of drinken.
- Gebruik het product 10 dagen lang elke dag, of volg de instructies van uw tandarts.

WAARSCHUWINGEN & EERSTE HULP INSTRUCTIES

Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water en medische hulp inroepen.

Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

BEWAARADVIES

Bewaren op een koele, droge (vorstvrije) plaats, beschermd tegen direct zonlicht.

Your impression is our concern

Geproduceerd in Nederland

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.