

Productbeschrijving

VPS lepeladhesief, vervaardigd door 3M ESPE, zorgt voor een goede hechting tussen afdruklepels en additiesilicone afdrukmaterialen van 3M ESPE.

 De gebruiksinformatie van een product dient gedurende de gehele gebruiksperiode te worden bewaard.

Toepassingsgebieden

- Afdruklepel van metaal, methacrylaat of polypropyleen.
- Vinyl polysiloxaan afdruk materiaal (niet geschikt voor polyether afdruk materiaal).

Voorzorgsmaatregelen

VPS lepeladhesief is licht ontvlambaar. Statische oplading vermijden. Ver van hitte, vonken, open vuur, ontstekingsvlammen en andere ontstekingsbronnen houden.

3M ESPE veiligheidsdatablad zijn onder www.mmm.com of bij uw plaatselijke vestiging verkrijgbaar.

Toepassing

- ▶ De afdruklepel na het passen in de mond van de patiënt eerst reinigen om contaminatie van het adhesiefpenseel te voorkomen.
- ▶ Het adhesief met het penseel in een dunne laag op de lepel aanbrengen.
- ▶ Goed laten drogen, 5–15 minuten zijn ideaal.
- ▶ De fles na gebruik weer zorgvuldig sluiten. Evt. aanwezige verontreinigingen met adhesief voor het sluiten eerst met een in aceton gedrenkte doek verwijderen van de schroefdraad van de fles en het schroefdeksel.

Reiniging

- ▶ Afdruk- en adhesiefresten op de metalen lepel met ethanol verwijderen.

Opmerkingen

- Adhesiefresten uit verschillende flessen mogen niet worden samengevoegd. Te volle flessen kunnen al bij geringe opwarming exploderen.
- Bij afdruklepels van andere kunststoffen of basisplaten zorgt VPS lepeladhesief niet altijd voor voldoende hechting.
- Het adhesief in geen geval aanbrengen op textiel, kunststof platen, gelakte oppervlakken e.d., omdat de resten dan niet volledig kunnen worden verwijderd.
- VPS lepeladhesief alleen in goed geventileerde ruimten verwerken.
- Bij huidcontact met water wassen.

Bewaren en houdbaarheid

Het product bewaren bij temperaturen tussen 15–25°C/59–77°F.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIEDT GEEN ENKEL ANDERE GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor zover een ontheffing van aansprakelijkheid wettelijk is toegestaan, kan 3M ESPE in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade door dit product, ongeacht of het daarbij om directe, indirecte, bijzondere, begeleidende of vervolgschade, onafhankelijk van de wettelijke basis, inclusief garantie, contract, nalatigheid of opzet, handelt.

Stand van de informatie februari 2011