

3M ESPE

Polyether Adhesive

NEDERLANDS

Beschrijving van het product

Polyether Adhesive (polyetheradhesief) zorgt voor een goede hechting tussen afdruklepels en polyether afdrukmaterialen van 3M.



De gebruiksinformatie van dit product moet zolang worden bewaard als het product wordt gebruikt.

Toepassingsgebieden

- Afdruklepels van metaal, methacrylaat of polypropyleen.
- Polyether afdrukmaterialen

Voorzorgsmaatregelen

Polyether Adhesive is licht ontvlambaar. Oplading van statische elektriciteit vermijden. Ver van hitte, vonken, open vuur, ontstekingsvlammen en andere ontstekingsbronnen houden.

3M veiligheidsbladen kunnen via www.mmm.com worden besteld, of neem contact op met uw plaatselijke vestiging.

Applicatie

- ▶ De afdruklepel na het passen in de mond van de patiënt eerst reinigen om contaminatie van het adhesiefpenseel te voorkomen.
- ▶ Het adhesief met het penseel in een dunne laag op de lepel aanbrengen.
- ▶ Goed laten drogen, 1 – 15 minuten zijn ideaal.
- ▶ De fles na gebruik weer zorgvuldig sluiten.
 - Evt. aanwezige verontreinigingen met adhesief voor het sluiten van de fles eerst met een in aceton of ethanol gedrenkte doek verwijderen van de schroefdraad van de fles en het schroefdeksel.

Reiniging

- ▶ Afdruk- en adhesiefresten op de metalen lepel kunnen met aceton of ethanol worden verwijderd.

Opmerkingen

- Adhesiefresten uit verschillende flessen mogen niet worden gemengd. Te volle flessen kunnen al bij geringe opwarming exploderen.

- Bij afdruklepels van andere kunststoffen of basisplaten zorgt Polyether Adhesive niet altijd voor voldoende hechting.
- Het adhesief in geen geval aanbrengen op textiel, kunststof platen, gelakte oppervlakken e.d., omdat de resten dan niet volledig kunnen worden verwijderd.

Bewaren en houdbaarheid

Het product bewaren bij temperaturen tussen 15-25°C/59-77°F.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie

3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie juli 2015