



Gebruiksaanwijzing

Palabond®

Productbeschrijving

Palabond is een hechtvloeistof voor het verbeteren van de hechting tussen kunststof-prothesetanden en prothesekunststof.

Samenstelling

Methylmethacrylaat, dimethacrylaat, methacrylzuur

Verwerking

Na het isoleren van het gipsmodel met Aislar® worden de basale vlakken van de elementen met een grove diamantboor of door zandstralen opgeruwd en vervolgens van slijpstof ontdaan om de hechting tussen basiskunststof en de kunststofelementen te verbeteren. Breng Palabond tweemaal aan met een kwastje (zonder metalen zetting) en laat het beide keren 30 seconden inwerken. Het adhesief blijft na de tweede keer aanbrengen 10 minuten actief. Verwerk vervolgens de prothesekunststof volgens de desbetreffende gebruiksinformatie.

Reparatie

Bij reparaties van prothesen moeten de te verbinden kunststofdelen eveneens opgeruwd worden (groeve diamantboor) en, zoals beschreven, voorbehandeld worden met Palabond.

Opmerking

Palabond is na het aanbrengen 10 minuten werkzaam. De prothese moet binnen deze tijd bewerkt c.q. gerepareerd worden.

Opslagcondities

Niet boven 25°C (77°F) bewaren. Na afloop van de vervaldatum mag het materiaal niet meer worden gebruikt. Direct zonlicht vermijden. Na gebruik verpakking weer goed sluiten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Voor het eerste gebruik visueel op beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt.

Gevaren/Veiligheidsinformatie

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. Explosie veilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparatuur gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdoen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Veiligheidsinformatiebladen en meer informatie zijn beschikbaar op onze website www.kulzer.com

® = gedeponeerd handelsmerk van Kulzer GmbH

Status: 2017-07