

UNIVERSAL ADHESIVE

Gebruiksaanwijzing **NL**

Toepassingsgebied:

Middel voor het tot stand brengen van hechting tussen confectie- of individuele afdruklepels (b. v. van PEKATRAY®, TRIGOTRAY®) en siliconen afdrukmetaal.

Productkleur: blauw

Productbasis: siliconenhars

Verwerking:

- Een dunne laag UNIVERSAL ADHESIVE gelijkmatig aanbrengen op de binnenzijde van de afdruklepel en aan de buitenzijde van de lepelrand. Het oppervlak moet voor het aanbrengen droog en vetvrij zijn.
- Daarna ca. 2 minuten laten drogen. Afdrukmetaal in de lepel aanbrengen.

Aanwijzingen:

De droogtijd kan verkort worden door blazen.

Resten van het UNIVERSAL ADHESIVE kunnen met ethylalcohol verwijderd worden.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:

- Vlekken op werkkleding en andere kledingstukken vermijden. Deze zijn zeer moeilijk te verwijderen.
- Contact met ogen en huid vermijden, evt. naspoelen met veel schoon water.
- Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen, dampen niet inademen.
- Fles onmiddellijk na gebruik goed sluiten.

Opslag:

Niet boven 25°C (77°F) bewaren!

Houdbaarheid: zie opdruk op verpakking!

Waarschuwing:

- Licht ontvlambaar