

Definitie

Coltène® Adhesive is een universeel adhesiemiddel voor afdrukmaterialen op basis van siliconen.

Materiaaltype

Polysiloxaan

Toepassing

Coltène® Adhesive wordt gebruikt om een betere hechting te bekomen tussen afdruk materiaal en afdruklepel.

Contra-indicaties

Zijn bij correct gebruik van het product niet bekend.

Neven- en wisselwerkingen

Bevat Hexamethyldisiloxan. Alleen gebruiken in goed verluchte lokalen!

Vermijd bronnen die kunnen ontsteken!



GHS02



GHS09

Gevaar

- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
P210 Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/ vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gebruik

De afdruklepel met een zo dun mogelijk laagj Coltène® Adhesive bestrijken; minstens 1 min laten drogen of met lucht droog blazen.

Flesje meteen na gebruik weer sluiten!**Schoonmaken van de lepels**

Uitgehard afdruk materiaal kan met een bot werktuig worden verwijderd. Leg de lepel dan in een universeel oplosmiddel of in lichte benzine zodat het laagje Coltène® Adhesive kan oplossen. Oplosmiddelen alleen gebruiken in goed verluchte lokalen! Maak vervolgens de lepel op de gebruikelijke wijze schoon en desinfecteer.

Houdbaarheid en bewaring

Coltène® Adhesive blijft—als het flesje goed gesloten is minstens houdbaar tot de op de verpakking aangebrachte vervaldatum. Het product wordt best bewaard bij 15–23°C/59–73°F en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

Markering

De vervaldatum en het -nummer staan op de verpakking vermeld.

Aanbevelingen

Het product wordt enkel geleverd aan tandartsen, aan tandtechnici en aan personeel dat in hun opdracht werkt.
Bewaar het product buiten het bereik van kinderen!

Uitgiftedatum van deze handleiding

02-2017