

METAL PRIMER Z

PRIMER VOOR HET HECHTEN VAN KUNSTHARS AAN METAAL EN ZIRKONIUM

METAL PRIMER Z

is een primer vloeistof ontwikkeld voor het behandelen van het hechtoppervlak van metaal, zirkonium en prothetische hulpmiddelen om daarmee een sterke hechting te creëren met kunstharscementen, laboratorium kunstharsen en directe composieten en acrylaten. Alleen te gebruiken door dentale professionals in de aanbevolen indicaties.

AANBEVOLEN INDICATIES

Het hechten van acrylaat en composiet aan prothetische hulpmiddelen van metaal en zirkonium zoals hieronder uitgelegd in de GEBRUIKSAANWIJZING.

CONTRA-INDICATIES

Vermijd gebruik van dit product bij patiënten met bekende allergie voor methacrylaatmonomeer, methacrylaatpolymeer of ethanol.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

1. Het aanbrengen van een opake kunsthars op metaal voor een metalen composiet facetkroon.
2. Bevestigen van inlays, kronen en bruggen met een kunstharscement.
3. Het hechten van prothese kunststof aan een magnetisch attachment.
4. Hechten van een prothesekunststof aan een metalen anker of een attachment.
5. Herstellen van een prothese met een metalen anker of attachment

Opmerking:

Na het uitspoelen van de was, reinig het hechtoppervlak met behulp van een stoomreiniger. Verwijder de was volledig met behulp van een oplosmiddel alvorens METAL PRIMER Z aan te brengen.

6. Hechten van kunsthars aan metalen orthodontische hulpmiddelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

EXTRA-ORALE toepassing in alle gevallen

1. Het metalen oppervlak zandstralen met aluminiumoxide en blaas schoon met de luchtspruit. Vermijd contaminatie met olie, separators of vocht.
2. Doseer 2-3 druppels METAL PRIMER Z in een schoon dappenglaasje. Met behulp van een penseel wordt een dunne laag op het hechtoppervlak aangebracht. Daarna laten drogen.
3. Direct daarna een kunsthars materiaal aanbrengen op het voorbehandelde oppervlak volgens de voorschriften van de desbetreffende fabrikant.

INTRA-ORALE toepassing in het geval van het herstellen van prothetische hulpmiddelen.

1. Breng cofferdam aan. Opmerking: Verzekert u ervan dat cofferdam wordt toegepast om direct contact met het orale weefsel te vermijden.

2. Ruw het metalen oppervlak op met een zandstraler of met een grove diamantsteen. Vermijd contaminatie met olie, separators of vocht.

3. Doseer 2-3 druppels METAL PRIMER Z in een schoon dappenglaasje. Met behulp van een penseel wordt een dunne laag op het hechtoppervlak aangebracht. Daarna laten drogen. Indien gewenst kan er tweede laag worden aangebracht.

4. Direct daarna een kunsthars materiaal aanbrengen op het voorbehandelde oppervlak volgens de voorschriften van de desbetreffende fabrikant.

OPSLAG

Voor een optimaal resultaat op kamertemperatuur bewaren (4-25°C) (39.2-77.0°F). Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum.

VERPAKKING

METAL PRIMER Z 5mL (1)

WAARSCHUWINGEN

1. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes en beschermbrillen.
2. METAL PRIMER Z is een zeer brandbare vloeistof en damp. Niet gebruiken in nabijheid van een open vlam. Houd weg van ontstekingsbronnen. Houd weg van direct zonlicht. Gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
3. Vermijd inslikken van het materiaal.
4. In geval van contact met het orale weefsel, onmiddellijk verwijderen met een wattenpropje of een sponsje. Direct spoelen na cementeren.
5. In geval van contact met de huid, onmiddellijk verwijderen met een wattenpropje of een sponsje. Wassen met water en zeep.
6. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medische hulp inroepen.
7. Sluit de flacon onmiddellijk na gebruik. Als er dampcondensatie aanwezig is op de flacon METAL PRIMER Z, onmiddellijk afvegen.
8. Meng het niet met andere primers.
9. Bewaar op een goed geventileerde plek.
10. Voer alle afval af volgens de plaatselijke verordeningen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com> of voor Amerika

<http://www.gcamerica.com> Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE: MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN:

Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.