

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

I. INLEIDING

ALLOY PRIMER is een metalen hechtprimer.
Het product wordt gebruikt om de hechting tussen tandmetalen en op kunststof gebaseerde materialen te verbeteren.

II. INDICATIES

- Hechting van metalen inlays, onlays, kronen, bruggen en metalen stiftanden
- Herstelling van gebarsten kroonoppervlakken op basis van kunststof en metalen kronen en bruggen met porseleinkern
- Productie van verwijderbare kunstgebitten met metalen basis, haak of bevestiging
- Herstelling van kunstgebitten

III. CONTRA-INDICATIE

Patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor methacrylaatmonomeren of aceton

IV. VOORZORGSMAATREGELEN

1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

1. Vermijd het gebruik van het product bij patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor methacrylaatmonomeren of aceton.
2. Indien er een overgevoeligheidsreactie optreedt, het gebruik van het product stopzetten en een arts raadplegen.
3. Draag handschoenen of neem andere beschermende maatregelen om het optreden van overgevoeligheid te voorkomen, die kan optreden door contact met methacrylaatmonomeren of aceton.
4. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met de huid of in de ogen terechtkomt. Voor u het product gebruikt, bedek de ogen van de patiënt met een doek om zijn/haar ogen te beschermen tegen spatten van het product.
5. Indien het product in contact komt met menselijke lichaamsweefsels, moet u de volgende stappen ondernemen:
<Indien het product in de ogen terechtkomt>
Spoel onmiddellijk het betrokken oog met overvloedig veel water en raadpleeg een arts.
<Indien het product in contact komt met de huid of de mondslijmvliezen>
Wrijf meteen schoon met een wattenschijfje of gaas, bevochtigd met ethanol en spoel met overvloedig veel water.
6. Zorg ervoor dat de patiënt het product niet per ongeluk inslikt.
7. Gebruik niet dezelfde wegwerpborsteltop voor verschillende patiënten om kruisbesmetting te voorkomen. Gooi de top weg na gebruik en steriliseer de houder van de borsteltop na elke patiënt.
8. Indien de patiënt onwel wordt na het inademen van de aceton in het product, moet u de patiënt aanmoedigen om grote happen verse lucht in te ademen.

2. Voorzorgsmaatregelen behandeling en manipulatie

1. Indien het metalen hechtingsoppervlak besmet is met speeksel voor of na het aanbrengen van het product, moet u het oppervlak schoonmaken met een wattenschijfje bevochtigd met ethanol en de primer opnieuw aanbrengen.
2. Bij cementeren van kernen van edel metaal met een kunststofcement (bijv. PANAVIA F2.0), gebruik een conditioner voor het tandoppervlak (bijv. PANAVIA F2.0 ED PRIMER II) na het aanbrengen van ALLOY PRIMER.
3. Indien het metalen frame niet correct kan worden losgemaakt van het werkmodel na het voorbereiden van een wasgebit, omhulsel of soldering is het aan te raden het frame te zandstralen voordat het wasgebit wordt voorbereid.
4. Zorg indien nodig voor vochtbeheer met een cofferdam.
5. Het product mag enkel worden gebruikt door een gediplomeerde tandarts.
6. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan deze die in de INDICATIES worden beschreven.

3. Voorzorgsmaatregelen bewaring

1. Merk op dat de ALLOY PRIMER brandbaar is. Niet gebruiken of bewaren in de buurt van open vlammen.
2. Niet gebruiken na de vervaldatum. Merk op dat de vervaldatum aan de buitenkant van de verpakking of houder vermeld is.
3. Het product moet bewaard worden bij kamertemperatuur (2-25°C/36-77°F). Vermijd blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.
4. Het product is vluchtig. De dop moet zo snel mogelijk na gebruik worden teruggeplaatst. Indien de houder open blijft, zal de vluchtige aceton verdampen.

V. BESTANDDELEN

1. Bestanddelen

ALLOY PRIMER : 5 ml / 1 flesje

2. Ingrediënten

- Hoofdingrediënten
- Aceton
 - 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogeen fosfaat (MDP)
 - 6-(4-Vinylbenzyl-N-propyl)amino-1,3,5-triazine-2,4-dithione (VBATDT)

VI. KLINISCHE PROCEDURES

A. Hechting van metalen inlays, onlays, kronen, bruggen en metalen stiftanden

Wanneer u een kroon cementeert met een kunststofcement

1. Behandel de kroon
- 1) Zandstraal het binnenoppervlak van de kroon. Was de kroon vervolgens met water en droog.
- 2) Breng het product aan op de binnenkant van de kroon met een wegwerpbare borsteltop en laat drogen.
2. Behandel de metalen kern (wanneer de metalen kern gemaakt is met een legering van edelmetaal)
- 1) Maak de metalen kern ruw met een diamantpunt. Spoel daarna het oppervlak met water en droog.
- 2) Breng het product aan op de metalen kern met een wegwerpbare borsteltop en laat drogen.
- 3) Breng een tandoppervlakconditioner (bijv. PANAVIA F2.0 ED PRIMER II) aan op het metalen abutment en de tandstructuur.

[WAARSCHUWING]

Metalen kernen die gemaakt zijn met een legering van edelmetaal moeten een laagje tandoppervlakconditioner (bijv. PANAVIA F2.0 ED PRIMER II) krijgen nadat het product werd aangebracht.
Indien de metalen kern bevuild is met speeksel voor of na de aanbrenging van het product, moet hij worden schoongemaakt met een wattenschijfje bevochtigd met ethanol en opnieuw de primer krijgen.

3. Cementeren (zie Gebruiksaanwijzing van het kunststofcement dat u gebruikt)
Cementeer met een kunststofcement (bijv. PANAVIA F2.0).

B. Herstelling van gebarsten kronen op basis van kunststof en metalen kronen en bruggen met een porseleinen kern

Wanneer u herstelt met een hechtmiddel en een lichtuithardende composietkunststof

1. Behandel het gebarsten oppervlak van het porselein
- 1) Verwijder een laagje porselein met een diamantpunt en maak een schuine rand op het margegebied.

- 2) Behandel het oppervlak met een etsmiddel op basis van fosforzuur (bijv. K-ETCHANT GEL) gedurende de opgegeven tijd, spoel met water en droog.
2. Behandel het blootliggende metaal
- 1) Maak ruw met een diamantpunt. Spoel vervolgens met water en droog.
- 2) Breng het product aan op het metalen hechtoppervlak met een wegwerpbare borsteltop en laat drogen.

[WAARSCHUWING]

Indien het metalen hechtoppervlak bevuild is met speeksel voor of na het aanbrengen van de primer, moet u het oppervlak reinigen met een wattenschijfje bevochtigd met ethanol en de primer opnieuw aanbrengen.

3. Breng een hechtmiddel aan (zie de gebruiksinformatie van de gebruikte hechtmiddel)
Breng een hechtmiddel (bijv. CLEARFIL SE BOND, CLERFIL TRI-S BOND) aan op de porseleinen en metalen oppervlakken.
4. Vul met een composietkunststof (zie de gebruiksinformatie van de gebruikte lichtuithardende composietkunststof)
- 1) Om de metalen kleur te verbergen, brengt u een opake kunststof aan (bijv. CLEARFIL ST OPAQUER) op het metalen oppervlak en voert u de lichtbehandeling volgens de beschrijving uit.
- 2) Breng een composietkunststof (bijv. CLEARFIL AP-X) aan en voer de lichtbehandeling volgens de beschrijving uit.

C. Het maken van uitneembare kunstgebitten met een metalen basis, haak of bevestiging

Wanneer u acrylkunststoffen voor kunstgebitbasis gebruikt (acrylkunststof met warmtebehandeling, zelfhechtend acrylkunststof)

1. Behandel het metalen frame
Zandstraal het metalen frame. Spoel vervolgens het oppervlak met water en droog.
2. Breng het product aan
Breng het product met een wegwerpbare borsteltop aan op het metalen hechtoppervlak en laat drogen.
3. Uitharden van een acrylkunststof voor kunstgebitbasis (zie gebruiksinformatie voor de gebruikte acrylkunststof voor kunstgebitbasis)
Maak een acrylkunststof voor kunstgebitbasis en uithard het.

D. Herstellen van kunstgebitten

Wanneer u een zelfhechtend acrylkunststof gebruikt

1. Behandel het metalen hechtoppervlak
- 1) Slijp het metalen hechtoppervlak met een carborundumpunt om een nieuwe laag vrij te maken.
- 2) Zandstraal het oppervlak, spoel en droog.
2. Breng het product aan
Breng het product met een wegwerpbare borsteltop aan op het metalen hechtoppervlak en laat drogen.
3. Breng een zelfhechtend acrylkunststof aan (zie de gebruiksinformatie voor het zelfhechtende acrylkunststof dat u gebruikt)
Breng een zelfhechtend acrylkunststof aan op het metalen hechtoppervlak.

[GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. vervangt eventuele bewezen defecte producten. Kuraray Noritake Dental Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe, consequentiële of bijzondere verliezen of schade die voortvloeien uit de toepassing of het gebruik of het onvermogen om deze producten te gebruiken. Voor het gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van de producten voor het bedoelde gebruik beoordelen en de gebruiker draagt alle risico's en aansprakelijkheid van welke aard ook in verband hiermee.

[OPMERKING]

CLEARFIL, CLERFIL TRI-S BOND, CLEARFIL AP-X en PANAVIA zijn handelsmerken van KURARAY CO., LTD.