

ALMINAX

Instructies

Gebruik een sheet voor prothetische werk of twee voor kroon- en brugwerk. Maak de sheet zachter in warm water (45°C). Verwijder overtollig vocht van het oppervlak met een tissue. Kneed in een massa indien gewenst. Gebruik de was voor een accurate beetregistratie en koel in de mond met water of perslucht. Gesmolten was kan verbranden. Let op : Ontsmet de was voordat deze naar een tandtechnisch laboratorium gaat.

Instructions

Use one thickness for prosthetic work or two for crown and bridge work. Soften in warm water (45°C). Remove and absorb excess moisture from the surface with a tissue. Knead into a mass if desired. Use to take accurate bite registrations and chill in the mouth with water or compressed air. Molten wax may burn. Caution: Disinfect the wax before sending it to a dental laboratory.

Gebrauchsanweisung

Eine Lage für Zahnarbeiten verwenden, zwei für Kronen und Brücken. Im warmen Wasser (45°C) aufweichen. Aus dem Wasser nehmen und überflüssige Feuchtigkeit mit einem Papiertuch aufnehmen. Bei Bedarf in einer Masse kneten. Die Masse für akkurate Gebissabdrücke benutzen und im Mund mit Wasser oder Druckluft abkühlen. Vorsicht: Nicht einriehen.