

DENTABS

De pil voor de
Gipsafscheider

- Voorkomt verstoppingen in rioolbuizen
- Vermindert rotte geuren
- Vergemakkelijkt het reinigen van separatoren

DENTABS - bindt gips, kwarts en
fosfaatgebonden investeringsmaterialen

Zelfs bij regelmatige reiniging van gipsseparatoren is afzetting in de afvoerbuis niet te voorkomen. Tussen 15 en 40% van het gips dat tijdens het afwerken ontstaat, bezinkt niet in conventionele gipssifons en leidt vroeg of laat tot verstoppingen. De situatie wordt extreem bij verdeelleidingen, wanneer dan niets meer werkt in het hele huis.

Eén tablet per week is voldoende, en er komt alleen helder water uit.

Voorkom verstoppingen met DENTABS pijpafdichtingsmiddelen

Wanneer een afvoerbuis verstopt raakt, is dat een echte noodsituatie. En de kosten lopen hoog op. Stilstand van het hele laboratorium, vertraagde leveringen, ontevreden klanten, of zelfs klantverlies in combinatie met overstromingen, stankoverlast en onvoorziene uitgaven maken het reinigen van leidingen allesbehalve prettig en kosteneffectief.

En zo werkt DENTABS:

Hang DENTABS na het legen van de gipsafscheider in het bijgeleverde doseermantje (bij meerkamerascheiders bij voorkeur aan de overloop naar de tweede kamer). Zorg ervoor dat de tablet volledig ondergedompeld is en niet direct in contact komt met het gipswater.

DENTABS geeft snel zijn werkzame stoffen af.

Zelfs de fijnste gipsdeeltjes worden samengeklonterd en zakken naar de bodem. Alleen helder water stroomt eruit.

DENTABS is milieuvriendelijk.

Wist u dat u maximaal 400 mg gips per liter water in het riool mag lozen, omdat gips beton aantast? Met DENTABS is dat slechts een paar milligram.

DENTABS hoeven niet te worden geëtiketteerd, zijn neutraal en onschadelijk in gebruik. De actieve ingrediënten in DENTABS voldoen vanzelfsprekend aan alle geldende regelgeving voor afvalwaterbeheer.

Reiniging van de separator is eenvoudig

U zult het zien: legen was nog nooit zo makkelijk. Met DENTABS voorkomt u de vorming van afzettingen. En waar niets hard wordt, is er ook niets te vullen.

Hygiënisch en geurloos

Iedereen met een neus voor problemen zal blij zijn, want schoon water ruikt niet en zwevende deeltjes worden gebonden. Maar discipline blijft geboden: restjes drank en zeepsop horen niet in uw separator!

Vlokvorming bindt zelfs de fijnste gipsdeeltjes samen, waardoor ze naar de bodem zakken. Alleen helder water stroomt dan weg.

Wilt u het vlokvormingsproces zelf observeren?

Vul een glazen bak met het gips-watermengsel uit de trimmer en voeg een klein stukje DENTABS-tablet toe. Schud het mengsel krachtig.

Hoe vaak heb je DENTABS nodig?

Het is simpel: één tablet is voldoende voor de gipsinhoud van een standaard separator, die ongeveer 15 liter bedraagt. Idealiter leegt u de separator wekelijks met één DENTABS. U bespaart tijd, u bespaart geld, u doet iets goeds voor uw medewerkers en het milieu. Het is goed voor u én uw portemonnee.