



Futar®

Futar® Fast

Futar® D

Futar® D Fast

Futar® D Slow

Futar® Scan

Materiaal voor beetregistratie op basis van vinylpolysiloxaan
DIN 13903

Made in Germany
37273/4211



Productbeschrijving

Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow en Futar® Scan zijn spuitbare additiesilicone, elastomere materialen voor beetregistratie voor een exacte registratie van de occlusale verhoudingen.

Toepassingen

- Alle Futar-beetregistratiematerialen (Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow en Futar® Scan) kunnen worden gebruikt voor een exacte registraties.
- Futar® D materialen (Futar® D, Futar® D Fast en Futar® D Slow) zijn geschikt voor toepassingen waarbij een harde silicone voor beetregistratie nodig is.
- Futar® Fast en Futar® D Fast kunnen worden gebruikt voor “kleinere toepassingen” door hun kortere verwerkingstijd.
- Futar® D Slow kan worden gebruikt voor tijdrovende beetregistraties op grond van de langere verwerkingstijd.
- Futar® Scan kan ook worden gebruikt voor een optische registratie van occlusale informatie voor CAD/CAM/CIM-systemen zonder gebruik van poeder.

Contra-indicaties

Gebruik Futar® beetregistratiematerialen niet voor conventionele afdrukken, omdat door de hogere eindutharding verwijdering uit de mond bemoeilijkt wordt en dit eventueel tot het onbedoeld trekken van tanden kan leiden.

Pas op

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Laat geen resten van het beetregistratiemateriaal achter in de sulcus of mondholte.

Het beetregistratiemateriaal niet inslikken! Bij inslikken: raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Contact met de ogen vermijden. Bij onbedoeld contact met de ogen: direct grondig uitspoelen met een oogdouche of water. Raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Het product veroorzaakt gewoonlijk geen allergische reacties; een allergische reactie kan bij gevoelige personen niet worden uitgesloten.

Gebruik van producten met actieve zwavel, aluminiumchloride of stikstofcomponenten (retractie-draden met ijzersulfaat, polysulfide afdrukmateriaal, enz.) samen met dit product zullen het uithardingsproces van het vinylpolysiloxaan negatief beïnvloeden. Na gebruik van deze materialen moet het gebied zorgvuldig worden uitgespoeld om alle resten te verwijderen.

Als men handschoenen draagt bij het hanteren van het materiaal, moeten deze worden getest met een monster van het product op verdraagzaamheid. Vermijd contact met latex handschoenen.

Laat het materiaal niet in de riolering of een afwateringssysteem terechtkomen om milieuschade te voorkomen.

Productoverzicht en technische gegevens

Product-naam	Verwerkingstijd bij 23° C/74° F ≤	Intraorale tijd bij 35° C/95° F ≤	Totale uithardingstijd* ≥	Hardheid (ca.) Shore	Lineaire maatverandering (ca.) %	Mengtechniek	Mengelamen
Futar®	30 seconden	1 minuut 30 seconden	2 minuten	A 90/ HD 58	- 0.20	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Statische groene mengcanule MB Ø 6,5 mm
Futar® Fast	15 seconden	45 seconden	1 minuut	A 90/ HD 58	- 0.20	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Statische groene mengcanule MB Ø 6,5 mm
Futar® D	30 seconden	1 minuut 30 seconden	2 minuten	D 43/ HD 76	- 0.10	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Statische groene mengcanule MB Ø 6,5 mm
Futar® D Fast	15 seconden	45 seconden	1 minuut	D 43/ HD 76	- 0.10	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Statische groene mengcanule MB Ø 6,5 mm
Futar® D Slow	1 minuut 30 seconden	3 minuten	4 minuten 30 seconden	D 43/ HD 76	- 0.10	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Statische groene mengcanule MB Ø 6,5 mm
Futar® D Scan	15 seconden	45 seconden	1 minuut	D 35/ HD 60	- 0.20	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Statische gele mengcanule MB Ø 4,2 mm

* Totale uithardingstijd (verwijdering uit mond) vanaf het begin van het mengen.

Opmerking

Voor het verkrijgen van optimale beetregistraties dient men zich strikt te houden aan de totale verwerkingstijd en intraorale uithardingstijd. Wanneer de temperatuur van het materiaal aanzienlijk afwijkt van 23 °C, wordt de verwerkings- en uithardingstijd beïnvloed.

Gebruiksaanwijzing

Steek het patroon in het Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1. Let op dat de inkepingen onder op het patroon omhoog wijzen. De hendel sluit niet als het patroon niet correct in het doseerpistool is gestoken.

Verwijder het deksel van het patroon. Het deksel kan na gebruik weer worden teruggeplaatst.

Schuif de zuiger in het patroon en duw een beetje afdrukmateriaal naar buiten totdat beide materialen gelijkmatig naar buiten worden gepompt.

Plaats een mengcanule op het patroon en draai het deksel 90 graden met de klok mee tot deze op zijn plek klikt.

Alleen voor professioneel gebruik via uw tandheelkundige behandelaar.

Spuut het materiaal direct op de occlusale oppervlakken of het beetsjabloon.

Laat de gebruikte mengcanule op het patroon na gebruik of sluit het patroondeksel.

Voordat het patroon weer wordt gebruikt, het patroondeksel of de gebruikte mengcanule verwijderen en weggooien. Controleer de patroonopeningen om vast te stellen dat er geen gepolymeriseerd materiaal is achtergebleven. Als dit wel het geval is, verstopte openingen leeg maken en een kleine hoeveelheid afdrukmateriaal naar buiten brengen totdat beide materialen gelijkmatig naar buiten komen.

Installeer een nieuwe mengcanule en ga verder zoals hierboven beschreven.

Het Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1 kan in de autoclaaf worden gesteriliseerd.

Bewaren

Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren; niet blootstellen aan zonlicht en extreme temperatuurschommelingen vermijden.

Desinfectie

Beetregistraties kunnen worden gedesinfecteerd met bijv. een oplossing van 2% glutaraaldehyde of desinfectie-oplossingen (bijv. Silosept®). Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

Handelsmerken

Applyfix® 4, Silosept® en Futar® zijn gedeponeerde handelsmerken van Kettenbach GmbH & Co. KG.

Opmerking

Niet alle Kettenbach producten zijn in alle landen verkrijgbaar.

Aansprakelijkheidsbeperking

Behalve waar dit wettelijk verboden is, is Kettenbach GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade door dit product, ongeacht of het daarbij gaat om directe, indirecte, bijzondere, bijkomende schade of gevolgschade, ongeacht de juridische grondslag, inclusief garantie, contract, nalatigheid of onrechtmatige daad.

Legenda

Conform met MDD 93/42/EEG	CE	Gebruiken vóór:	
Temperatuurlimiet		Droog bewaren	
Uit het zonlicht bewaren		Catalogusnummer	REF
Chargeaanduiding	LOT	Let op, raadpleeg bijbehorende documentatie	
Duaal systeem (alleen Duitsland)		Diameter	Ø
Patroon		Statische mengcanule MB (voor eenmalig gebruik)	
Millimeter	mm	Millimeter	ml
Kleiner dan of gelijk aan	≤	Groter dan of gelijk aan	≥
Rx only Alleen voor dentaal gebruik door professionals.		Voor eenmalig gebruik	

De informatie over Kettenbach-producten is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en ervaring in applicatietechnologie. Resultaten worden naar beste weten verschaft, behoudens technische veranderingen binnen het kader van productontwikkeling. Gebruikers moeten echter alle aanbevelingen en informatie in samenhang met het gebruik opvolgen en in acht nemen.

