

Productbeschrijving

Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow en Futar® Cut & Trim Fast zijn spuitbare additiesilicone, elastomere materialen voor beetregistratie voor een exacte registratie van de occlusale verhoudingen.

Toepassingsgebied

- Alle Futar-beetregistratiematerialen (Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow en Futar® Cut & Trim Fast) kunnen worden gebruikt voor een exacte registraties.
- Futar® D materialen (Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow en Futar® Cut & Trim Fast) zijn geschikt voor toepassingen waarbij een harde silicone voor beetregistratie nodig is.
- Futar® Fast, Futar® D Fast en Futar® Cut & Trim Fast kunnen worden gebruikt voor "kleinere toepassingen" door hun kortere verwerkingstijd.
- Futar® D Slow kan worden gebruikt voor tijdrovende beet-registraties op grond van de langere verwerkingstijd.
- Futar® Cut & Trim Fast kan ook worden gebruikt voor optische registratie van occlusale informatie voor

CAD/CAM-systemen, zonder gebruik van poeder.

Waarschuwingen

Gebruik Futar® beetregistratiematerialen niet voor conventionele afdrukken, omdat door de hogere einduit-harding verwijdering uit de mond bemoeilijkt wordt en dit eventueel tot het onbedoeld trekken van tanden kan leiden.

Pas op

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Laat geen resten van het beetregistratiemateriaal achter in de sulcus of mondholte.

Het beetregistratiemateriaal niet inslikken! Bij inslikken: raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Contact met de ogen vermijden. Bij onbedoeld contact met de ogen: direct grondig uitspoelen met een oogdouche of water. Raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Het product veroorzaakt gewoonlijk geen allergische reacties; een allergische reactie kan bij gevoelige personen niet worden uitgesloten.

Gebruik van producten met actieve zwavel, aluminiumchloride

37273/5219

Futar®

of stikstofcomponenten (retractie-draden met ijzersulfaat, polysulfide afdruk materiaal, enz.) samen met dit product zullen het uithardingsproces van het vinylpolysiloxaan negatief beïnvloeden. Na gebruik van deze materialen moet het gebied zorgvuldig worden uitgespoeld om alle resten te verwijderen.

Als men handschoenen draagt bij het hanteren van het materiaal, moeten deze worden getest met een monster van het product op verdraagzaamheid. Gebruik geen latex-handschoenen.

Laat het materiaal niet in de riolering of een afwaterings-systeem terechtkomen om milieuschade te voorkomen.

Vermijd contact met kleding, omdat het materiaal niet kan worden verwijderd door chemisch reinigen.

Opmerking

Voor het verkrijgen van optimale beetregistraties dient men zich strikt te houden aan de totale verwerkingstijd en intra-orale uithardingstijd. Wanneer de temperatuur van het materiaal aanzienlijk afwijkt van 23 °C (74 °F), wordt de verwerkings- en uithardingstijd beïnvloed.

Gebruiksaanwijzing

Steek de patroon in het Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1. Let op dat de inkepingen onder op de patroon omlaag wijzen. De hendel sluit niet als de patroon niet correct in het

doseerpistool is gestoken.

Verwijder het deksel van de patroon. Het deksel kan na gebruik weer worden teruggeplaatst.

Schuif de zuiger in de patroon en duw een beetje afdruk-materiaal naar buiten totdat beide materialen gelijkmatig naar buiten worden gepompt.

Plaats een mengcanule op de patroon en draai het deksel 90 graden met de klok mee tot deze op zijn plek klikt.

Spuit het materiaal direct op de occlusale oppervlakken of het beets-jabloon.

Na gebruik de sluitdop weer aanbrengen. Voor een volgend gebruik van de patroon de patroonsluiting of de gevulde meng-canule verwijderen, de openingen van de patroon controleren om er zeker van te zijn dat er geen gepolymeriseerd materiaal de openingen verstopt. Eventueel verstopte openingen vrijmaken en een kleine hoeveelheid afdruk-materiaal uitbrengen tot beide materialen gelijkmatig verplaatst worden.

Installeer een nieuwe mengcanule en ga verder zoals boven beschreven.

Reinigen en desinfecteren van de Applyfix® 4

- De cartridge verwijderen.
- Niet uitgehard materiaal met een in alcohol gedrenkte verwijderen.
- Het Applyfix® 4-doseerpistool is na desinfectie meermaals opnieuw bruikbaar. Bij zichtbare gebruikssporen is een vervanging aanbevolen. De desinfectie kan met een in de handel verkrijgbaar dompelbad uitgevoerd worden. Kettenbach beveelt aan om te desinfecteren met glutaraldehydehoudende oplossingen.

Opslagcondities

Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren; niet blootstellen aan zonlicht en extreme temperatuurschommelingen vermijden.

Desinfectie

Afdrukken kunnen worden gedesinfecteerd met bijv. een oplossing van 2% glutaraldehyde of met desinfectie oplossingen speciaal voor afdruk materiaal. Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

Handelsmerken

Applyfix® 4 en Futar® zijn gedeponeerde handelsmerken van Kettenbach GmbH & Co. KG.

Opmerking

Niet alle Kettenbach producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Alleen voor dentaal gebruik door professionals.

Aansprakelijkheidsbeperking

Behalve waar dit wettelijk verboden is, is Kettenbach GmbH & Co. KG niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit dit product, ongeacht of het daarbij gaat om directe, indirecte, bijzondere, bijkomende schade of gevolgschade, ongeacht de juridische grondslag, inclusief garantie, contract, nalatigheid of onrechtmatige daad.

De informatie over Kettenbach-producten is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en ervaring in applicatietechnologie. Resultaten worden naar beste weten verschaft, behoudens technische veranderingen binnen het kader van productontwikkeling. Gebruikers moeten echter alle aanbevelingen en informatie in samenhang met het gebruik opvolgen en in acht nemen.

Bijgewerkt: 23 december 2019

37273/5219

Futar®

Productoverzicht en technische gegevens

Productnaam	Verwerkings-tijd bij 23° C/74° F ≤	Intraorale tijd bij 35° C/95° F ≤	Totale uithardings-tijd* ≥	Hardheid (ca.) Shore	Lineaire maatverandering (ca.) %	Mengtechniek	Mengelement
Futar®	30 seconden	1 minuut 30 seconden	2 minuten	A 90	- 0,20	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Mengcanule, groen, Ø 6,5 mm
Futar® Fast	15 seconden	45 seconden	1 minuut	A 90	- 0,20	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Mengcanule, groen, Ø 6,5 mm
Futar® D	30 seconden	1 minuut 30 seconden	2 minuten	D 43	- 0,10	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Mengcanule, groen, Ø 6,5 mm
Futar® D Fast	15 seconden	45 seconden	1 minuut	D 43	- 0,10	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Mengcanule, groen, Ø 6,5 mm
Futar® D Slow	1 minuut 30 seconden	3 minuten	4 minuten 30 seconden	D 43	- 0,10	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Mengcanule, groen, Ø 6,5 mm
Futar® Cut & Trim Fast	15 seconden	45 seconden	1 minuut	D 35	- 0,20	Applyfix® 4 doseerpistool DS-50 1:1/2:1	Mengcanule, gele, Ø 4,2 mm

* Totale uithardings-tijd (verwijdering uit mond) vanaf het begin van het mengen.