

MEMOREG® 2

Polyvinylsiloxaan voor directe applicatie
zeer hoge hardheid

Indicaties

- Standaard beetregistraties
- Fixatiemateriaal bij pijlpuntregistratie

Contra-indicaties

Memoreg 2 mag niet worden gebruikt voor conventionele afdrukken, omdat het door de eindhardheid erg moeilijk uit de mond kan worden verwijderd. Ongewenste extracties kunnen het gevolg zijn.

Bijwerkingen

Overgevoelige personen kunnen een allergische reactie vertonen op het product.

MEMOSIL® 2

Polyvinylsiloxaan voor directe applicatie
transparant

Indicaties

- front-, occlusiemal
- transfermatrix voor brackets (indirect lijmen)
- fixeren van röntgenkogels bij implantaatplanning

	MEMOREG® 2	MEMOSIL® 2
Verwerkingstijd*1	30 seconden	30 seconden
Minimaleverblijfsduur in de mond*2	60 seconden	3 min.
Shore A hardheid	90	72
Productkleuren	rose	transparant

*1 Totale verwerkingstijd (inclusief mengen) bij 23°C (73°F); verkort tot 20 s bij orale temperatuur (35°C (95°F))

*2 Minimumtijd dat het beetregistratiemateriaal in de gesloten mond moet blijven.

De vermelde data worden verstrekt naar ons beste weten en zijn gebaseerd op interne testresultaten.

Gebruiksaanwijzing

Voor eerste gebruik visueel op beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt. Mengtips en beetregistratietips zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. Vóór het aanbrengen van een mengtip een kleine hoeveelheid materiaal uit een 50 ml cartridge drukken. Bevestig de mengtip en fixeer deze door hem met de klok mee te draaien. Bij het appliceren wordt het materiaal automatisch gedoseerd en gemengd.

Wanneer beetregistratiemateriaal op basis van vinylpolysiloxaan in aanraking komt met latex handschoenen, retractieoplossingen of onlangs geplaatste composietvullingen, kan het uithardingsgedrag hierdoor beïnvloed worden.

Memoreg 2/Memosil 2 dient op kamertemperatuur te worden gebruikt (23°C (73°F)). Lagere temperaturen – bijvoorbeeld als het materiaal bewaard is in een koelkast – kunnen de verwerkingstijd verlengen en hogere temperaturen kunnen de verwerkingstijd verkorten.

Uitgeharde polyvinylsiloxanen zijn chemisch bestendig. Kleding kan permanent gekleurd worden als deze in contact komt met materiaal dat niet volledig is uitgehard.

Memoreg 2/Memosil 2 wordt met de groene mengtip aangebracht (1:1). Het kan ook gecombineerd worden met de beetregistratietip.

Desinfectie

Memoreg 2/Memosil 2 kan worden behandeld met een waterige natriumhypochlorietoplossing (5,25% gedurende maximaal 10 minuten*). De behandeling heeft geen effect op het oppervlak of de dimensionele nauwkeurigheid. Bij gebruik van andere desinfecterende oplossingen, die geschikt zijn voor gebruik met siliconen, dient u de aanwijzingen en verwerkingsinstructies van de fabrikant te volgen.

*(DGZMK 3/93 V1.0)

Opslagcondities

Bewaar niet boven 25°C (77°F).

Gebruik het materiaal niet meer wanneer de houdbaarheidsdatum is overschreden.

Vermeld bij alle correspondentie over het product het lotnummer en de vervaldatum.

Vervaldatum  en lotnummer : Zie opmerking op de verpakking.

Waarschuwing en veiligheidsinstructies

Na contact met de ogen dient u deze enkele minuten met een ruime hoeveelheid water te spoelen. Een oogarts raadplegen als de klachten niet verdwijnen.

Niet inademen, inslikken of consumeren. Indien na het inslikken van afdruk materiaal gezondheidsklachten optreden, waarschuw dan direct een arts.

In zeldzame gevallen kan darmverstopping optreden. Na inademen van het product onmiddellijk een arts raadplegen.

Laat geen restmateriaal achter in de sulcus of de mondholte.

Toepassing alleen door opgeleid tandartspersoneel.

Status: 2013-09