

BITE COMPOUND

THERMOPLASTISCH
AFDRUKMATERIAAL VOOR
BEETREGISTRATIES

Alleen te gebruiken door een
gekwalificeerde tandheelkundige in de
vermelde toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

Afdruk materiaal voor beetregistraties.

GEBRUIKSAANWIJZING

Boven een gasvlam of in warm water
zacht maken en in deze plastische fase
aanbrengen. Het juiste moment om de
afdruk te nemen is wanneer men de
BITE COMPOUND uit elkaar trekt en
er zich geen draden meer vormen maar
het materiaal wel makkelijk kan worden
gevormd.

Opmerking :
niet bij patiënten gebruiken wanneer
het nog te heet is (meer dan 45°C).

OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal
resultaat, bewaren op
kamertemperatuur
(4-25°C) (39.2-77.0°F).
(Houdbaarheid: tot 3 jaar na
productiedatum)

VERPAKKING

De standaard verpakking bevat: 120 g
(15 staafjes)

WAARSCHUWING

1. Bij aanraking met de ogen
onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen.
2. Bij sommige personen kan een
overgevoeligheid voor het product
niet worden uitgesloten. Mochten
zich allergische reacties voordoen,
dan moet de toepassing in die
gevallen worden stopgezet en een
arts worden geconsulteerd.
3. Draag altijd persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals
handschoenen, mondkapjes en
beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt
verwezen in het huidige
veiligheidsinformatieblad kunnen
worden geclassificeerd als gevaarlijk
volgens GHS. Maak u vertrouwd met
de veiligheidsinformatiebladen
beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com>
of voor Amerika

<http://www.gcamerica.com>
Zij kunnen ook worden verkregen bij
uw leverancier.

Laatste herziening : 07/2017