

ISO FUNCTIONAL

THERMOPLASTISCH ADRUKMATERIAAL IN STAAFVORM

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

Omdat ISO FUNCTIONAL de unieke eigenschap van zeer geleidelijk uitharden bezit, is het mogelijk er zeer nauwkeurige afdrukken mee te maken. Dit maakt het product in het bijzonder geschikt voor afdrukken voor rebasen en voor functionele afdrukken. Het kan ook gebruikt worden voor algemene afdrukken voor b.v. prothesen en afdrukken van wortelvlakken en stompen.

GEBRUIKSAANWIJZING

REBASEN

1. Bij de prothese wordt met een stalen frees of ander snijgend gereedschap 2-3 mm verwijderd van de rand en van de contactvlakken.
2. Bedek de vlakken die ontlast zijn met ISO FUNCTIONAL hetwelk boven een vlam zacht werd gemaakt.
3. Maak het materiaal opnieuw zacht door het in water van 45°C (113°F) te plaatsen. Breng de prothese in de mond en instrueer de patiënt dicht te bijten en de prothese in de centrale occlusie te houden. Pas 'muscle trimming' toe.
4. De prothese zal 1 dag in de mond blijven zodat met de normale kauwbewegingen een echte functionele afdruk wordt verkregen.
Opmerking :
Adviseer de patiënt in die periode geen warme dranken te nuttigen.
5. De gevormde afdruk wordt gebruikt om volgens de gebruikelijke methode een rebasing aan te brengen

OPMERKINGEN

- 1) ISO FUNCTIONAL is kleurvast, heeft geen smaak en geur en is niet irriterend voor mondweefsel.
- 2) Om te voorkomen dat ISO FUNCTIONAL gaat kleven, mag het niet te warm worden.
- 3) Als ISO FUNCTIONAL zich hecht aan de prothese, laat het dan hard worden en verwijder het met techniekboren en handinstrumenten. Verwijder de restanten met een oplosmiddel.

OPSLAG

Voor een optimaal resultaat op kamertemperatuur bewaren (4-25°C) (39.2-77.0°F).

VERPAKKINGEN

ISO FUNCTIONAL Sticks 120g (15 stuks)

WAARSCHUWING

1. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondklappers en veiligheidsbrillen.
2. Bij aanraking met de ogen, materiaal verwijderen en spoelen met water.
3. Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com>

of voor Amerika

<http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Laatste herziening : 10/2018