

GI-MASK[®] Universal Separator

Definitie

GI-MASK Universal Separator is een scheidingsmiddel voor additie- en condensatievernettende siliconen in het tandheelkundig laboratorium.

Materiaaltype

Oplossing van fluorcarbonharsen in isohexaan.

Toepassingsgebied

GI-MASK Universal Separator is bestemd voor de eenvoudige verwijdering van het tandvleesmasker uit de siliconesleutel of de siliconevorm.

Belangrijk

Draag altijd handschoenen.

Contra-indicaties

Bij bedoeld gebruik zijn geen contra-indicaties bekend.

Gebruik

1. Toepassingsplaats van de siliconesleutel of de siliconevorm met GI-MASK Universal Separator gelijkmatig bespuiten; daarbij voor goede ventilatie zorgen.
2. Ten minste 5 min. aan de lucht laten drogen.
3. GI-MASK-materiaal volgens de gebruiksinformatie toepassen.
4. Zodra het GI-MASK-materiaal is uitgehard, de siliconesleutel of siliconevorm voorzichtig zorgvuldig losmaken.

Houdbaarheid en bewaren

GI-MASK Universal Separator voldoet aan het bedoelde gebruik ten minste tot aan de uiterste gebruiksdatum, die op de verpakking is vermeld. In goed gesloten verpakking bewaren bij 15–23 °C / 59–73 °F en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

Markering

De uiterste gebruiksdatum en het  nummer zijn te vinden op de verpakking.

Opmerking

Bevat Hexaan – mengsel van isomeren, isopropylacetaat



GHS02



GHS07



GHS09

Gevaar

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P261 Aërosol niet inademen.
 P273 Voorkom lozing in het milieu.

P210 Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Publicatie van deze gebruiksinformatie

02-2015

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten / Switzerland
 Tel +41 71 757 5300
 Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com