

SILICONI PER CONDENSAZIONE (POLISILOSSANI) AD ELEVATA PRECISIONE PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO

ZETALABOR – HARD: Polisilossano miscelabile con catalizzatore in gel o liquido, caratterizzata da buona durezza finale, elevata stabilità, capacità di riproduzione dei dettagli (> 80 Shore A) e resistenza alle deformazioni.

TITANIUM – EXTRA HARD: Polisilossano miscelabile con catalizzatore in gel liquido, caratterizzata da durezza finale molto alta (> 90 Shore A), rigidità, precisione, stabilità dimensionale e termoresistenza.

CAMPI D'IMPIEGO

- Mascherine per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori; aggiunta o sostituzione di elementi su protesi totale o scheletrati. Maschere gengivali rimovibili (Gingifast – Zhermack).
- Parziale controstampo in muffola per protesi parziali o totali.
- Bloccaggio nella riparazione di protesi.
- Chiave di registrazione oclusale per il posizionamento in articolatore.
- Duplicazione di protesi totale e modelli in gesso, senza utilizzo di isolanti.
- Supporto per la lavorazione di resine composite fotopolimerizzabili.

ISTRUZIONI D'USO

Dosaggio:

Prelevare con il misurino la quantità necessaria di **ZETALABOR / TITANIUM** e stenderla sul palmo della mano (nota: il misurino deve essere raso). Imprimere il bordo del misurino sulla massa tante volte quanti sono i misurini dosati. Per ogni misurino dosato, stendere **due** strisce di catalizzatore **Zhermack Indurent Gel** della stessa lunghezza del misurino, pari a 4 cm (Fig. 1). Nel caso venga utilizzato il catalizzatore liquido **Zhermack Indurent Liquid**, dosarne 5–6 gocce per ogni misurino raso.

Miscelazione / impiego:

Ripiegare la massa su se stessa ed impastare energicamente con la punta delle dita per circa 30 sec. fino a raggiungere una tonalità di colore omogeneo e senza striature (Fig. 2). Iniziare quindi a modellare la massa secondo necessità. Il tempo di lavorazione, inclusa la miscelazione, è di circa 2 min. a temperatura ambiente utilizzando il catalizzatore in gel; con il catalizzatore liquido, i tempi si riducono di circa 30 sec (Fig. 3). L'indurimento avviene in circa 6 min. (Fig. 4).

AVVERTENZE / PRECAUZIONI

I tempi indicati si intendono dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F). Elevate temperature o sovradosaggi di catalizzatore accelerano l'indurimento. Basse temperature o sottodosaggi rallentano l'indurimento. Chiudere accuratamente gli indurenti dopo l'uso. Evitare di macchiare gli indumenti. È consigliato l'uso di guanti. Evitare il contatto della pelle e degli occhi con il catalizzatore. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua corrente ed interpellare il medico. In caso di ingestione chiamare subito un medico.

STOCCAGGIO E GARANZIA

Garantito per un periodo di 36 mesi se conservato correttamente tra 5°e 27°C (41°-80°F).

DATI TECNICI

	ZETALABOR		TITANIUM	
	INDURENT LIQUID	INDURENT GEL	INDURENT LIQUID	INDURENT GEL
Tempo di miscelazione*	30''	30''	30''	30''
Tempo di lavorazione*	1'30''	2'	1'30''	2'
Tempo di indurimento*	5'30''	6'	5'30''	6'
Durezza Shore A	85	80	95	90
Deformazione alla compressione	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
Recupero elastico	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Riproduzione dettagli	2 µm	2 µm	< 2 µm	< 2 µm
Variazione dimensionale lineare	- 0,20%	- 0,10%	- 0,20%	- 0,10%

*I tempi indicati si intendono dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F).

OSSERVAZIONI IMPORTANTI: La consulenza rilasciata verbalmente, per iscritto o attraverso dimostrazioni sull'uso dei nostri prodotti si basa sullo stato attuale della pratica odontotecnica e del nostro know-how. Essa è da considerarsi un'informazione non impegnativa anche in relazione ad eventuali diritti di terzi e non esime l'operatore professionale da controllare personalmente se il prodotto è idoneo all'applicazione prevista. L'utilizzo e l'applicazione da parte dell'operatore professionale avvengono senza possibilità di controllo da parte dell'Azienda e pertanto sottostanno alla responsabilità dell'operatore professionale. Un'eventuale responsabilità di danni si limita al valore della merce fornita dall'Azienda ed utilizzata dall'operatore professionale.

SOLO PER USO DENTALE

NUR FÜR ZAHNÄRZTLICHE ANWENDUNG