

Productbeschrijving/indicatie

Adhesief voor additievernettend afdruk- en reliningafdruk materiaal van Kettenbach voor hechting aan metalen en kunststoffen.

Gebruiksaanwijzingen

Breng het adhesief meerdere keren op het volledige oppervlak van de afdruklepel aan, zodat het hele oppervlak van de lepel zichtbaar blauw is. Laat het ongeveer 5 minuten drogen. Warmte en perslucht verkorten de droogtijd. Controleer bij afdruklepels van acryl of het adhesief geschikt is. Sluit de fles onmiddellijk na gebruik!

Doe binnen 30 minuten het gemengde afdruk materiaal op de lepel.

Resten van afdruk materiaal kunnen van de lepel afgeveegd worden met wasbenzine, petroleumether of sinaasappelolie.

Waarschuwingen

Gebruik Panasil® Adhesief niet met condensatie-uithardende siliconen, polyether- of polysulfidemateriaal.

Pas op

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Materiaal niet inslikken! Bij onbedoeld inslikken: raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Vermijd contact met de ogen. Bij onbedoeld contact met de ogen: direct grondig uitspoelen met een oogdouche of water. Raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Contact met de huid vermijden.

Laat het materiaal niet in de riolering of een afwateringssysteem terechtkomen, om milieuschade te voorkomen (gevaarlijk voor water). Niet afvoeren als huishoudelijk afval.

Vermijd contact met kleding, omdat het materiaal niet kan worden verwijderd door een stomerij.

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

Bijwerkingen

Hoewel er geen systemische bijwerkingen bekend zijn, kan in zeldzame gevallen contactallergie niet worden uitgesloten.

Gebruik het materiaal niet bij een bestaande allergie voor een van de ingrediënten.

Samenstelling

Siliconen, oplosmiddel (ethylacetaat, xylol).

Opslagcondities

Bewaar op een droge plaats bij kamertemperatuur; niet blootstellen aan zonlicht en extreme temperatuurschommelingen vermijden.

Handelsmerken

Panasil® Adhesief is gedeponeerde handelsmerken van Kettenbach GmbH & Co. KG.

Opmerking

Niet alle producten van Kettenbach zijn in alle landen verkrijgbaar. Alleen voor dentaal gebruik door professionals.

Aansprakelijkheidsbeperking

Voorzover een uitsluiting van de wettelijke aansprakelijkheid mogelijk is, kan Kettenbach GmbH niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van dit product, ongeacht of het daarbij om directe, indirecte, bijzondere, begeleidende of gevolgschade gaat en ongeacht de wettelijke grondslag, inclusief garantieaanspraken, overeenkomsten, nalatigheid of opzet.

De gegevens over de producten van Kettenbach berusten op omvangrijk onderzoek en technische ervaringen van gebruikers.

Deze resultaten presenteren wij naar beste weten, maar onder voorbehoud van technische wijzigingen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het product.

Dit ontslaat de gebruiker van de producten echter niet van de verplichting, rekening te houden met de aanbevelingen en instructies voor het gebruiken ervan.

Versie: 29 september 2017