

Elastomeer precisieafdrukmetaal op additiesiliconenbasis

Alle producten van het Provil novo assortiment worden 1 : 1 (Volume of gewicht) gedoseerd.

Aanwijzingen voor gebruik

Het Provil novo assortiment is een ideaal op elkaar afgestemd systeem. De vele varianten kunnen individueel worden gecombineerd voor alle afdruktechnieken. Wij raden u aan Provil novo niet met andere siliconenmaterialen te combineren. Voor eerste gebruik visueel op beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt. Niet inslikken of innemen. Indien na het inslikken van afdrukmetaal gezondheidsklachten optreden, waarschuw dan direct een arts. In zeldzame gevallen kan darmverstopping optreden. Er zijn geen allergieën aangetoond, desondanks kunnen allergische reacties op het product niet uitgesloten worden. Toepassing alleen door opgeleid tandartspersoneel.

Na gebruik moeten de tubes / potten zorgvuldig worden gesloten. Verwissel geen deksels, doppen of lepels. Bij cartridges bevelen wij aan om voor het plaatsen van de mengtip eerst wat metaal uit de cartridge te drukken. Laat na gebruik de mengtip op de cartridge als sluiting. Net voor het volgende gebruik eerst wat metaal uitdrukken en dan een nieuwe mengtip plaatsen.

De uitharding van alle additiesiliconen kan worden beïnvloed door contact met latex handschoenen, retractorvloeistoffen, eugenolhoudende producten en pasgelegde composietvullingen.

		EN ISO 4823	Productkleur		Mengtijd [s]	Verwerkingstijd* [min:s]	Minimal verblijfs- duur in de mond [min:s]	Toebehoren	
			Basis	Katalysator				Mengtips	Intraorale tips
Putty	<i>fast set</i>	Type 0 kneedbaar	groen	lichtgrijs	30	1:30	2:30	-	-
Putty	<i>regular set</i>		groen		30	2:00	3:30	-	-
Putty soft	<i>fast set</i>		turkoois		30	1:30	2:30	-	-
Putty soft	<i>regular set</i>		turkoois		30	2:00	3:30	-	-
Monophase	Tube	Type 2 gemiddeld vloeibaar	blauw	lichtgrijs	30	2:30	3:30	-	-
Monophase CD 2	<i>fast set</i>		blauw		-	1:30	2:30	groen 66001989	wit 65687514
Monophase CD 2	<i>regular set</i>		lichtblauw		-	2:00	3:30	groen 66001989	wit 65687514
Medium	Tube		geel	lichtgrijs	30	2:30	3:30	-	-
Medium CD 2	<i>fast set</i>		geel		-	1:30	2:30	geel 66001988	geel 66000782
Medium CD 2	<i>regular set</i>		lichtgeel		-	2:00	3:30	geel 66001988	geel 66000782
Light	Tube	Type 3 dunvloeibaar	donkergroen	lichtgrijs	30	2:30	3:30	-	-
Light CD 2	<i>fast set</i>		donkergroen		-	1:30	2:30	geel 66001988	geel 66000782
Light CD 2	<i>regular set</i>		groen		-	2:00	3:30	geel 66001988	geel 66000782

* op basis van kamertemperatuur 23°C (73°F), 50% relatieve vochtigheid. Bij hogere temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen langzamer.

Bijwerkingen:	Dit product of de bestanddelen ervan kunnen in bepaalde gevallen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Als een dergelijke reactie vermoed wordt, kan informatie over de ingrediënten worden verkregen bij de fabrikant.
Vervaardiging van het model:	Het uitgieten van de afdruk kan reeds 60 min. na verwijdering uit de mond plaatsvinden; er zijn geen verdere tijdsbeperkingen. De afdruk is stabiel in langdurige opslag.
Aanbevolen modelmetaal:	Alle normaal in de handel verkrijgbare modelmaterialen kunnen worden gebruikt. Wij raden aan: Klasse III gips, MOLDANO®; Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Galvanisering:	Afdrukken kunnen galvanisch in de gebruikelijke baden worden verkoperd en verzilverd.
Desinfectie:	Afdrukken kunnen met een waterige natriumhypochlorietoplossing (5,25%, max.10 minuten*) of met andere voor siliconen geschikte desinfectiemiddelen worden behandeld. Neem daarbij de desinfectie-/verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikanten in acht. * (DGZMK 3/93 V1.0)
Adhesie:	Wij raden het gebruik van onze Universal Silicone Adhesives aan.
Bewaren:	Niet bewaren boven 25°C (77°F).