

Corega Fresh Cleanse

Dagelijkse gebitsprotheseroutine: Fresh Cleanse

U bent waarschijnlijk gewend om iedere dag een tandenborstel met tandpasta te gebruiken, en wellicht denkt u dat dit ook goed is voor uw nieuwe gebitsprothese. Niet echt. Eigenlijk raden wij alle dragers van een gebitsprothese met klem aan om te stoppen met het gebruik van normale tandpasta op hun gebitsprothese!

Tandpasta bevat schuurmiddelen die krassen kunnen maken in uw nieuwe gebitsprothese, waardoor bacteriën zich makkelijker kunnen hechten en groeien. En bacteriën zijn de oorzaak van een slechte adem.

Dus wat moet u doen voor uw dagelijkse routine?

Spoel en borstel uw gebitsprothese na elke maaltijd. Gebruik een zachte gebitsborstel die uw gebitsprothese reinigt zonder het acryl te beschadigen. Gewone tandpasta kan microscopisch kleine krasjes veroorzaken die een schuilplaats bieden aan bacteriën. Bovendien zorgt Fresh Cleanse ervoor dat uw gebitsprothese tot wel vijf uur lang fris blijft aanvoelen. Het is eenvoudig te gebruiken, gewoon pompen, borstelen en afspoelen! Corega Fresh Cleanse kunt u twee keer per dag of vaker gebruiken om dat frisse gevoel te houden. Onthoud: behandel uw gebitsprothese boven een wasbak half gevuld met water. Dit helpt uw gebitsprothese te beschermen als u het laat vallen. Gebruik Corega Fresh Cleanse niet in uw mond.

Laat nadat u met een tandenborstel en Fresh Cleanse heeft geborsteld, uw gebitsprothese weken in de oplossing. Spoel na het weken uw gebitsprothese af met stromend water.



Plaats geen tabletten of tabletoplossing in uw mond. Dit diepreinigend proces zal helpen om vlekken te verwijderen, 99,9% van geurveroorzakende bacteriën doden en effectief tandplak en geurveroorzakende aanslag verwijderen. Corega dringt zelfs door in spleetjes om voedselresten te verwijderen die achterblijven bij borstelen. Bewaar uw gebitsprothese altijd in water om te verhinderen dat het uitdroogt. En vergeet uw gebitsprothese niet af te spoelen en te drogen alvorens het weer in te doen. Vergeet niet om, bij het reinigen van uw gebitsprothese, ook uw overgebleven tanden en tandvles te reinigen. Goede mondverzorging is een essentieel onderdeel van uw dagelijkse gebitsroutine