



ERNST HINRICHS GmbH

Dental- und Gipspräparate

Bimssteinpulver

Verarbeitungsanleitung

Bimssteinpulver ist lieferbar in den Körnungen grob, mittel und fein.

Aufgrund des Schutzes vor Bakterien und Viren wird anstelle von Wasser eine Bimsdesinfektion empfohlen zu verwenden. Im Poliertrog wird die Bimsdesinfektion vorgelegt und mit Bimssteinpulver aufgefüllt bis ein Breigemisch entsteht. Das Gemisch sollte mit der Hand aufgenommen werden, ohne dass es zwischen den Fingern durchläuft damit eine gewisse Haftung auf dem zu polierendem Objekt gewährleistet wird.

Es ist darauf zu achten, dass die zu polierenden Kunststoffoberflächen immer wieder mit feuchtem Bimssteinpulver benetzt werden um ein Überhitzen zu vermeiden.

Zur Vorpolitur können handelsübliche Bürsten verwendet werden. Meist reichen Leinenschwabbeln und Ziegenhaarbürsten aus, um eine starke Abrasion von unebenen Stellen und gleichzeitig eine äußerst glatte Oberfläche zu erzeugen.

Nun kann wie gewohnt die Hochglanzpolitur vorgenommen werden.

Körnungen: grob, mittel, fein

Liefergebilde Bimssteinpulver: 5 kg Beutel, 5 kg Eimer, 10 kg Eimer, 25 kg Papiersack, 20 kg Karton

Liefergebilde Bimsdesinfektion: 1.000 ml, 5.000 ml

MR 01/2009