

Omschrijving

De KMG Paste is bedoeld voor het polijsten van dentale kunststoffen, composieten en metalen. De polijstpasta kan in combinatie met borsteltjes (bv. van geitenhaar) en lappenschijfjes (bv. van leer) voor het voor- en hoogglanspolijsten worden gebruikt.

Samenstelling

In een wateremulsie gedispergeerde aluminium-oxide.

Toepassing – Polijsten van

- > kunststof en composiet facings
- > de kunststof onderdelen van gedeeltelijke en volledige protheses
- > metalen restauraties (bv. inlays, onlays, kronen, etc.)

Niet geschikt voor

- > Het polijsten van metaalkeramiekrestauraties
- > Toepassing in de mond

VERWERKING**Bij kunststof**

Polijst de oppervlakken vooraf al naar gelang de gewenste oppervlaktestructuur met KMG Paste en geitenharen borsteltjes. Polijst de oppervlakken vervolgens met KMG Paste en lappenschijfjes van katoen of leer op hoogglans. Al naar gelang de gewenste hoogglans kunnen katoenen lappenschijfjes voor zwakkere en leren lappenschijfjes voor sterke hoogglans worden gebruikt.

Bij metaal

Voor het polijsten van metalen kunnen zowel viltschijfjes als harde of zachte borsteltjes worden gebruikt. Hoogglans wordt bereikt met wollen lappenschijfjes.

Reiniging

Reinig het oppervlak na het polijsten met een stoomstraler of ultrasoon. Spoel vervolgens het gehele oppervlak met een zeepoplossing na.

Veiligheidsinstructies

- > Mag niet in handen van kinderen komen.
- > Irriterend voor de ogen en de huid.
- > Vermijd contact met de ogen en de huid.
- > Dampen niet inademen.
- > Bij onverhoopt contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
- > Na aanraking met de huid moet deze onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water worden gewassen.
- > Bij inslikken niet laten braken. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon deze de verpakking of het etiket.
- > Niet in de gootsteen of waterafvoer laten komen

Opslag

- > Opslagtemperatuur: 12–28 °C / 54–82 °F

Dit produkt is ontwikkeld voor tandtechnische toepassingen en moet verwerkt worden zoals beschreven in de handleiding. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de verwerkingsvoorschriften en het niet respecteren van de verwerkingsgebieden. Bovendien is de gebruiker ertoe verplicht het materiaal vóór gebruik op eigen verantwoordelijkheid op geschiktheid en bruikbaarheid voor de geplande doeleinden te controleren, vooral als die gebruiksdoeleinden niet in de onderhavige gebruiksaanwijzing vermeld zijn.