



PAPILLAMETER

De Papillameter is een hulpmiddel voor het meten van de lengte van de bovenlip. De gemeten waarde geeft uitsluitsel over de lengte van de middelste bovenste snijtanden en over de hoogte van de bovenste beetwal.

TOEPASSING

Om een zo nauwkeurig mogelijke meting uit te voeren dient de patiënt een rechte houding aan te nemen. Vervolgens wordt de Papillameter verticaal in lengterichting voorzichtig onder de ontspannen bovenlip geduwd, tot hij met het steunpunt op de papilla incisiva ligt. Voor een betere benadering is het aan te bevelen deze meting een tot twee keer te herhalen, om een zo goed mogelijk meetresultaat te behalen.

De Papillameter wordt op 134 °C in de autoclaaf gesteriliseerd.

