

Gebruiksaanwijzing Palavit® G

Samenstelling

Koudpolymerisaat op basis van methylnmethacrylaat in poeder- en vloeibare vorm. Het katalysatorsysteem bevat tertiaire amine. Palavit G is cadmiumvrij.

Toepassingsgebieden

Voor het modelleren van kronen en bruggen bij de giettechniek.

Opmerking

Niet geschikt voor intra-oraal gebruik.

Ter berekening van het legeringsgewicht

Dichtheid van Palavit G = 1,2 g/cm³.

Eigenschappen

Korte en zekere uitharding, hoge precisie, vormvast, verwekingstemperatuur ca. 110°C (230°F), verbrandt zonder reststoffen.

Toepassing

Penseelmethode

Een met vloeistof bevochtigd penseel wordt in het klaargezette poeder gedoopt. Het opgeloste Palavit G kan zo worden verwerkt.

Gietbare pasta

De Palavit G-vloeistof in het mengbakje gieten; poeder bijmengen tot de massa nog licht vloeibaar is. Mengverhouding tussen poeder en vloeistof is ca. 5:3.

Kneedbare pasta

In het mengbakje Palavit G tot een stroperige pasta aanmengen. Nadat de pasta kneedbaar-plastisch is geworden, kan deze in de juiste vorm gekneet en aangebracht worden.

Polymerisatie

Uithardingstijd ca. 10 min; de uithardingstijd is afhankelijk van de verwerkingsmethode en de omgevingstemperatuur.

Bewaren

Niet boven 25°C (77°F) bewaren. Na afloop van de vervaldatum mag het materiaal niet meer worden gebruikt. Direct zonlicht vermijden. Verpakking na verwijdering van het product weer goed sluiten. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Gevaren

Licht ontvlambaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing, inslikken en aanraking met de huid. Gevaar van cumulatieve reacties. Irriterend voor de ogen. Irriterend voor de ademhalingswegen. Irriterend voor de huid. (Irriteert het slijmvlies). Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken. Maatregelen nemen tegen elektrostatische opladingen. Beschermende kleding dragen. In geval van brand zand, kooldioxide of een poederblusmiddel gebruiken. Nooit water gebruiken. Dampen niet inademen.

Afvoer

Bij de afvoer dienen de nationale voorschriften en het veiligheidsinformatieblad te worden opgevolgd.
(Verkrijgbaar op www.kulzer-dental.com of bij uw Kulzer-contactpersoon.)

® = gedeponeerd handelsmerk van Kulzer GmbH

Status: 2013-07