

GC RELINE™ PRIMER R

PRIMER/ADHESIEF VOOR VINYL

POLYSILOXAAN RELINING MATERIAAL

GC RELINE™ MODIFIER

COATING VOOR VINYL POLYSILOXAAN

RELINING MATERIAAL

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen

door landheeskundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

1. GC RELINE™ PRIMER R : Voor het hechten van GC RELINE™ Soft of Extra Soft en MODIFIER aan prothesekunststof.
2. GC RELINE™ MODIFIER : Voor het afwerken van randen van GC RELINE™ Soft of Extra Soft en van de prothesekunststof.

CONTRA-INDICATIES

In enkele zeldzame gevallen kan het product bij bepaalde personen overgevoeligheid veroorzaken. Indien dergelijke reacties optreden, gebruik het product dan niet langer en raadpleeg een arts.

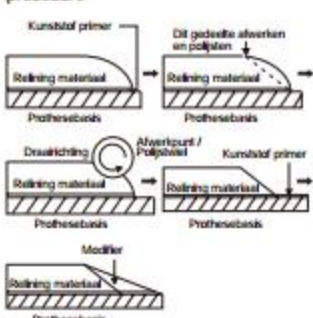
GEBRUIKSAANWIJZING :**GC RELINE™ PRIMER R**

1. Controleer en pas de prothese aan op de gebruikelijke wijze.
2. Maak ruimte op de plaats waar de voering moet worden aangebracht.
3. Reinig de prothese met een zeepoplossing en maak goed droog. Breng met een schone, droge penseel GC RELINE™ PRIMER R (kunststof primer) aan op het hechtvlak en droog voorzichtig met olievrije lucht. Contamineer het oppervlak niet met latex handschoenen etc.
Opmerking : Verontreinig de fles PRIMER R niet met vocht. Anders wordt de Primer vloeistof troebel. Na gebruik de fles goed sluiten.
4. Breng het GC RELINE™ Soft of het Extra Soft materiaal rechtstreeks op de prothese aan. Breng de prothese aan in de mond en laat functionele bewegingen te maken. Neem de prothese uit de mond en verwijder de overmaat aan GC RELINE™ materiaal en polijst de randen. (Zie ook de gebruiksaanwijzing in de GC RELINE™ Soft of de Extra Soft verpakking).

GEBRUIKSAANWIJZING :**GC RELINE™ MODIFIER**

1. Indien het wenselijk wordt geacht om nog gladder af te werken, breng dan PRIMER R op de perifere grenzen en randen van de prothese aan. Breng geen primer aan op het aangebrachte GC RELINE™ Soft of Extra Soft materiaal.
2. Nadat de primer voorzichtig is gedroogd (als genoemd bij punt 3), brengt men het mengsel van GC RELINE™ MODIFIER A en B aan op de randen van zowel het eerder aangebrachte GC RELINE™ materiaal, als van de prothese zelf. (Zie de volledige gebruiksaanwijzing in de GC RELINE™ Soft of de Extra Soft verpakking.)

Diagram voor de stappen in de procedure

**OPSLAG**

Bewaar bij normale temperatuur, 15-25°C (59-77°F) buiten bereik van direct zonlicht. (Houdbaarheid: 2 jaar vanaf de datum van fabricage)

VERPAKKINGEN

1. GC RELINE™ PRIMER R
Primer 12g (13mL)
2. GC RELINE™ MODIFIER 1-1 verpakking
A - 10g (9mL), B - 10g (9mL), 1 mengblok (No. 15), sponsje

WAARSCHUWING

1. De primer is vluchtig en ontvlambaar. Gebruik het niet in nabijheid van vuur. Sluit het flesje direct na gebruik en houd het verwijderd van ontstekingsbronnen.
2. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.