

PATTERN RESIN™ LS

MODELEER KUNSTSTOF

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

AANBEVOLEN INDICATIES

- (1) Maken van giet-modellen voor:
 - conuskronen (pyramidevormig) en andere telescoopkronen.
 - inlays, palatinale and linguale bars, connectors en ankers.
 - etsbruggen.
- (2) Tijdelijke splints voor het solderen.
- (3) In de mond voor restloos verbrandende stompopbouwmodellen.
- (4) Modellen voor suprastructuren op implantaten.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden gestopt.

WAARSCHUWING

Bevat methylnmethacrylaat. Bij direct gebruik in de mond voor een stiftopbouw, dient men erop te letten dat het materiaal geen contact maakt met de huid of het mondslijmvlies. Indien dit per ongeluk toch gebeurt, verwijder dan het gemorste materiaal onmiddellijk en spoel het gecontamineerde deel overvloedig met water.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Klaarzetten poeder en vloeistof

Neem voldoende hoeveelheden poeder en vloeistof in aparte rubber cups (Fig. 1).

2. Opbouwen model (voor modellen voor secundaire kronen van conuskronen of telescoopkronen)

- a) Bevochtig de tip van het penseel met vloeistof en neem hiermee een kleine hoeveelheid poeder op (Fig. 2).
- b) Plaats het mengsel op de kroon en vorm het model voor de secundaire kroon door die procedure te herhalen (Fig. 3).
 - In dit geval is geen separatiemiddel vereist. Maar als u een hardgipsmodel wordt gewerkt zal GC Acro Sep, GC MULTI-SEP of vaseline als separatiemiddel worden toegepast.
 - Maak na afloop of zonodig tussendoor het penseel schoon met de vloeistof.

3. Controle van het inwendige oppervlak van het giet-model

Nadat de kunstharis is verhard (bij

23°C/73°F), wordt het model voorzichtig van de primaire kroon genomen en worden de randen en de binnenzijde gecontroleerd (Fig. 4).

4. Nauwkeurige afwerking

- a) Plaats het model weer op de primaire kroon en breng met een frees de wanddikte op een uniforme maat (0.3-0.4 mm) (Fig. 5).
- b) Neem het model weer af en controleer de wanddikte met een meetpasser (Fig. 6).

5. Opwassen en vervaardiging venster

- a) Voor het opwassen wordt inlay-was gebruikt (Fig. 7). Opmerking: Het is niet nodig alvorens op te wassen het giet-model schoon te maken.
- b) Maak het venster voor de facing (Fig. 8).
- c) Breng retentieparels aan (Fig. 9).

6. Inbedden uitbranden en gieten


Voor een enkelvoudige kroon kunnen de gebruikelijke procedures worden toegepast. Voor een groot model moet de temperatuur eerst gedurende 1 uur op 250°C (482°F) worden gehouden voordat de temperatuur verder wordt opgevoerd (Fig. 10).

OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele plaats buiten bereik van direct zonlicht.

OPMERKINGEN

1. Vermeng niet met andere chemisch hardende kunstharis.
2. Restanten van poeder en vloeistof niet terug gieten in de flessen.
3. Als vloeistof in contact komt met de huid deze met water en zeep afwassen.

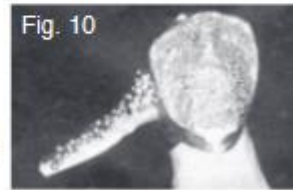

VERPAKKINGEN

1. Poeder: 100g, 1kg
2. Vloeistof: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g poeder, 100g (105mL) vloeistof, accessoires

WAARSCHUWING

1. De vloeistof is licht ONTVLAMBAAR. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
2. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.
3. Personal Protective Equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com>

of voor Amerika:

<http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Ongewenste effecten-rapporteren

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en evenals ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental

Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 08/2019